

Instruktioner för bild- och ljudupptagningsystem vid medicinsk simulering SimCapture på Akutmottagningen SkaS

Förändringar sedan föregående version
Ny rutin.

Sammanfattning

Rutin för simuleringsinstruktörer och vid behov övrig vårdpersonal för bild- och ljudupptagningsystemet SimCapture i samband med medicinsk simulering på akutmottagningen vid Skaraborgs Sjukhus.

Bakgrund och syfte

SimCapture är en heltäckande molnbaserad lösning för insamling och hantering av simuleringsbaserad utbildning inom hälso- och sjukvård.

Genom detta bild- och ljudupptagningsystem ges instruktörer inom medicinsk simulering möjlighet att styra och kommunicera från ett avskilt kontrollrum under en medicinsk simuleringsövning.

Akutmottagningen bedriver viss medicinsk simuleringsverksamhet i ordinarie lokaler där patienter och vårdpersonal vistas övrig tid. För att säkerställa att ingen bild- och ljudupptagning sker utanför den medicinska simuleringen är denna rutin framtagen.

Denna rutin är till för instruktörer inom medicinsk simulering samt övrig vårdpersonal på akutmottagningen för att säkerställa att ingen bild- och ljudupptagning sker när patient eller vårdpersonal befinner sig på rum där SimCapture-systemet är installerat.

Förutsättningar

Ljud- och bildupptagningssystemet ska endast vara i drift vid simuleringsövning på aktuellt rum.

Avgränsningar

Målgrupp som denna rutin avser är instruktörer inom medicinsk simulering samt vid behov övrig vårdpersonal på akutmottagningen.

När patient och/eller vårdpersonal vistas på rum där SimCapture är installerat ska detta system inte vara i drift.

För att systemet ska startas krävs både att display inne på aktuellt akutrum aktiveras och att instruktör startar programmet inne i kontrollrum. Varje inspelning raderas automatiskt inom 24 timmar.

Förberedelser

För att starta systemet krävs att instruktör startar programvaran ifrån kontroll dator och att kamerorna aktiveras via display inne på aktuellt akutrum.

Lokaler

SimCapture-systemet är installerat på akutrum 1 och 3 samt simuleringsrummet och anslutande kontrollrum på akutmottagningen.

Utrustning

På akutrum 1 och 3 samt simuleringsrummet finns kameror, mikrofon och högtalare fast installerat. På akutrum 1 och 3 finns även en väggdisplay för indikering av systemdrift samt möjlighet att vid behov stänga av systemet.

Kontrollrummet är utrustat med kortläsare som därmed begränsar tillträdet till behöriga. SimCapture-systemet styrs från kontrollrummet via dator och program med lösenordsbehörighet.

Utförande

Inför en medicinsk simuleringsövning på akutrum 1 eller 3 startar instruktör igång systemet från kontrollrummet. Det krävs även att instruktören aktiverar kameror via displayen i aktuellt akutrum. Att systemet är i drift indikeras på display ”Inspelning pågår Tryck för att stoppa” i aktuellt akutrum.

Efter avslutad övning stänger instruktör av systemet i kontrollrummet. Systemet kan även stängas av via väggdisplayen på aktuellt akutrum. Vid behov av att simuleringsövningen behöver avbrytas, till exempel om patient behöver vårdas på aktuellt rum, kan systemet direkt stängas av via väggdisplayen på aktuellt akutrum eller via instruktör i kontrollrummet. Varje inspelning raderas automatiskt inom 24 timmar.

Relaterad information

[Bilaga SimCapture.pdf](#)

Arbetsgrupp

Simuleringsinstruktörer Emma Herre, Felicia Brauer, Therese Winell, Tobias Kaminsky samt systemansvarig Lucas Hedendahl.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VO4 Akutsjukvård

Innehållsansvar: Tobias Kaminsky, (tobka), Sjuksköterska

Granskad av: Magdalena Borell, (magbo10), Enhetschef

Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1),
Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9678-1600500551-128

Version: 1.0

Giltig från: 2026-05-04

Giltig till: 2028-05-04