

Gäller för: VE Bild o funktionsmed

Innehållsansvar: Sofia Thimberg, (softh3), Sjuksköterska

Granskad av: Andreas Kennberg, (andke3), Medtekn ingenjör

Godkänd av: Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

Giltig från: 2024-08-21

Giltig till: 2026-08-13

Manuell inmatning i ultraljudsmaskinen General Electric Logiq E10 – BFM radiologi

Förändringar sedan föregående version

Förlänger giltighetsdatum. Ändrar innehållsgranskare till Andreas Kennberg. Uppdaterade bilder samt mindre justeringar.

Syfte

Denna rutin är till för att röntgenpersonalen ska veta hur man skriver in patienter manuellt i ultraljudsmaskinen General Electric Logiq E10.

Utförande

Manuell inmatning i ultraljudsmaskinen General Electric Logiq E10

- Starta ultraljudsmaskinen.
- Tryck på **PATIENT** (på touchskärmen).
- Startsidan kommer fram (Patient ska vara blåmarkerad i vänstra hörnet).
- Välj New Patient.

Skriv in:

Patient ID: Personnummer 191212121212 (12 siffror, inget bindestreck)

Last Name: Efternamn

First Name: Förnamn (alla namn)

DOB: DD/MM/YYYY (ex. 12/12/1912), **Age** kommer upp automatiskt

Sex: välj female eller male

Operator: välj utförande läkare

Patient ID:	191212121212	Last Name:	testsson	DOB:	12/12/1912
		First Name:	test	Age:	111Y
		Middle Name:		Sex:	<input type="radio"/> female <input checked="" type="radio"/> male
ABD OB GYN CARD VAS UR SMP PED					
Operator: ADM					

Tryck på **Freeze** för att starta undersökningen.

Avsluta undersökningen med **END EXAM** och **End Current Patient**.

Granska ultraljudsbilder i ultraljudsmaskinen

Om PACS:et är ur funktion granskar läkaren tagna bilder i ultraljudsmaskinen då dessa inte går att skicka till AW-SERVER.

- Från startsidan välj **Hide** (Patient ska vara blåmarkerad i vänstra hörnet).
- Ställ markören på aktuell patient och dubbelklicka.
- Tryck på **Freeze**.

Välj önskad bild till vänster för att se denna i full storlek.

Tryck på **PATIENT** på touchskärmen för att avsluta.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Bild o funktionsmed

Innehållsansvar: Sofia Thimberg, (softh3), Sjuksköterska

Granskad av: Andreas Kennberg, (andke3), Medtekn ingenjör

Godkänd av: Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9700-757502554-199

Version: 3.0

Giltig från: 2024-08-21

Giltig till: 2026-08-13