

Gäller för: VE Bild o funktionsmed

Giltig från: 2025-08-19

Innehållsansvar: Josefine Strid, (josst11), Röntgensjuksköterska

Giltig till: 2027-09-30

Granskad av: Tim Eriksson, (timer3), Medicintekniker

Godkänd av: Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

# Manuell inmatning på Celex

## Förändringar sedan föregående version

Förlänger giltighetsdatum.

Ändrat Labben A1 och Lab4 till GML1 och GML2

## Syfte

Denna rutin är till för att röntgenpersonalen ska veta hur man skriver in patienter manuellt på Celex labben GML1 och GML2 om RIS:et inte skulle fungera.

## Utförande

### Manuell inmatning på Celex.

Driftsstopp av RIS/PACS och arbete under pappersrutin.

1. På **Exam**-fliken välj **Manual** och fyll i uppgifterna (se bild).  
Name: Efternamn, Förnamn  
Birth: YYYY/MM/DD  
ID: 191212121212 (12 siffror ej bindestreck)  
Sex: Male/Female



1. Välj Set eller Start Exam.
2. Ett tvingande fönster kommer upp och välj då rätt typ av undersökning. Start EXAM.
3. Skicka bilder genom att välja knappen Send to storage (en skruvmejsel med ett papper och en pil).
4. Kryssa i Geawserver. Välj Send image eller Send Exam för att skicka alla bilder.
5. Avsluta undersökningen.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** VE Bild o funktionsmed

**Innehållsansvar:** Josefine Strid, (josst11),  
Röntgensjuksköterska

**Granskad av:** Tim Eriksson, (timer3), Medicintekniker

**Godkänd av:** Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SKAS9700-757502554-201

**Version:** 8.0

**Giltig från:** 2025-08-19

**Giltig till:** 2027-09-30