

Gäller för: VE Bild o funktionsmed

Giltig från: 2025-09-10

Innehållsansvar: Ann-Charlotte Andersson, (annan29), Sektionsledare

Giltig till: 2027-10-06

Granskad av: Kent Magnusson, (kenma3), Medicinteknisk ingenjör

Godkänd av: Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

Manuell inmatning på Samsung GC85A och GM85

Förändringar sedan föregående version

Förlänger giltighetsdatum. Ändrat innehållsgranskare till Kent Magnusson, medtekn ingenjör. Ändrat text under rubrik Utförande.

Syfte

Denna rutin är till för att röntgenpersonalen ska veta hur man skriver in patienter manuellt på Samsung GC85A och GM85 om RIS:et inte skulle fungera.

Utförande

Manuell inmatning på Samsung GC85A och GM85

Du måste vara i Worklist

Välj:

New i nedre listen.

Skriv in:

Patient ID: Personnummer 191212121212

Ska vara 12 siffror, inga bindestreck.

Last name: Efternamn

First name: Förnamn (alla namn)

Birth date: (YYYY/MM/DD)

Sex: Male / Female

Accession#: Undersökningsnummer ska alltid fyllas i om det finns tillgängligt.

Procedure: Klicka på **Add:** och välj rätt undersökning. Om det är flera undersökningar på samma patient går det att lägga till fler undersökningar när du fått upp patienten på modaliteten, när du ska undersöka patienten.

När du är klar med undersökningen, klicka på **End exam** (ej auto send).

Sända bilderna till GEAWSERVERN.

Gå in i **Review**, markera din patient och de undersökningar som du vill skicka, tryck på ”**send to**” och välj **GEAWSERVER.**

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Bild o funktionsmed

Innehållsansvar: Ann-Charlotte Andersson, (annan29),
Sektionsledare

Granskad av: Kent Magnusson, (kenma3), Medicinteknisk
ingenjör

Godkänd av: Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9700-757502554-202

Version: 6.0

Giltig från: 2025-09-10

Giltig till: 2027-10-06