

Gäller för: VE Bild o funktionsmed

Giltig från: 2024-11-19

Innehållsansvar: Eva Högström, (evaho5), Röntgensjuksköterska

Giltig till: 2026-11-18

Granskad av: Andreas Lindgren, (andfr9), Medicinteknisk civilingenjör

Godkänd av: Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

Radera bilder med felaktigt vald patientidentitet på GE AW server - datortomografi

Förändringar sedan föregående version

Förlänger giltighetsdatum. Ändrar innehållsgranskare till Andreas Lindgren. I övrigt inga förändringar i dokumentet. Ändrat en del på grund av att vi uppgraderat AW-servern sedan sist.

Syfte


Hur personalen på datortomografin ska gå till väga när man röntgat på ”fel” patient och skickat bilderna till GE AW server.

Utförande


Klicka på förstoringsglasat och skriv in Chrome.



Om Chrome finns installerat på datorn kommer Chrome-appen fram som förslag. Klicka på den så startar en websida upp.

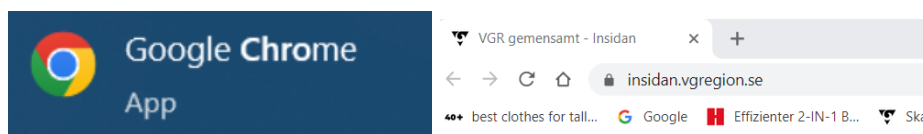

Skriv in 10.51.240.103 i rutan och tryck sedan ”Enter”.

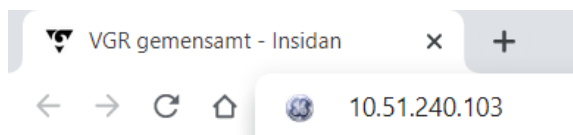


Eventuellt får du upp ett meddelande ”Anslutningen är inte privat”.
Klicka på ”Avancerat” och sedan ”Fortsätt till 10.51.240.103 (osäkert)”



Anslutningen är inte privat

Det är möjligt att hackare försöker stjäla dina uppgifter från **10.51.240.103** (till exempel lösenord, meddelanden eller kreditkort). [Läs mer om den här varningen](#)

NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID

 [Aktivera utökat skydd](#) för att få Chromes högsta säkerhet

Avancerat


Tillbaka till säker webbplats



Anslutningen är inte privat

Det är möjligt att hackare försöker stjäla dina uppgifter från **10.51.240.103** (till exempel lösenord, meddelanden eller kreditkort). [Läs mer om den här varningen](#)

NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID

 [Aktivera utökat skydd](#) för att få Chromes högsta säkerhet

Dölja avancerade uppgifter


Tillbaka till säker webbplats

Servern kunde inte bevisa att den är **10.51.240.103** eftersom datorns operativsystem inte litar på dess säkerhetscertifikat. Detta kan orsakas av en felaktig konfiguration eller att någon spärrar anslutningen.


[Fortsätt till 10.51.240.103 \(osäkert\)](#)

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.


Om följande sida visas. Välj ”Service- och administrationsverktyg”.

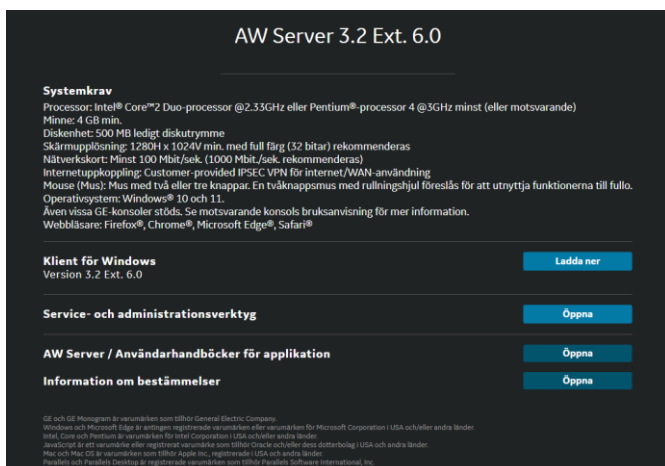


Logga in i AW Server.

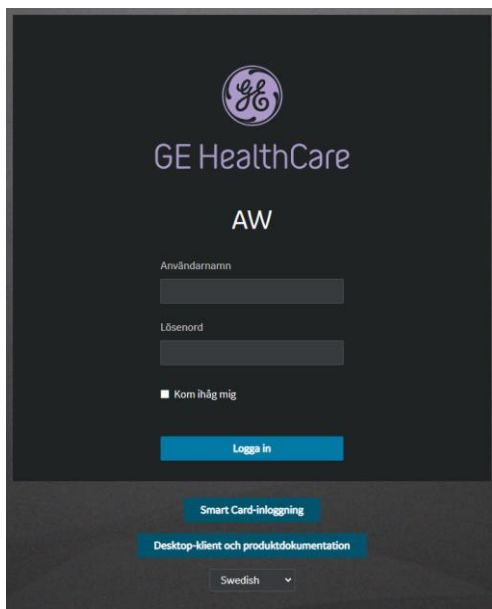

Klicka på Administrative/Utilities/Image Database.

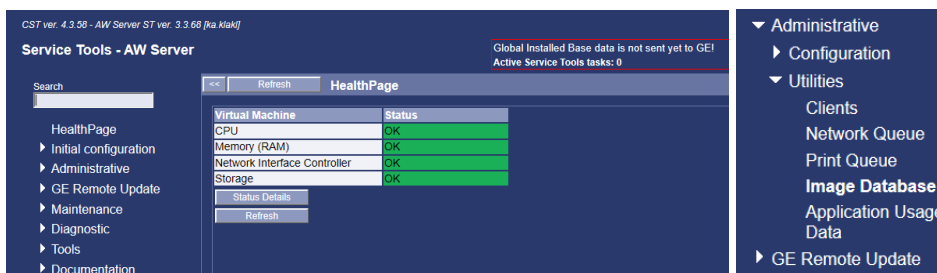

Följande sida visas.

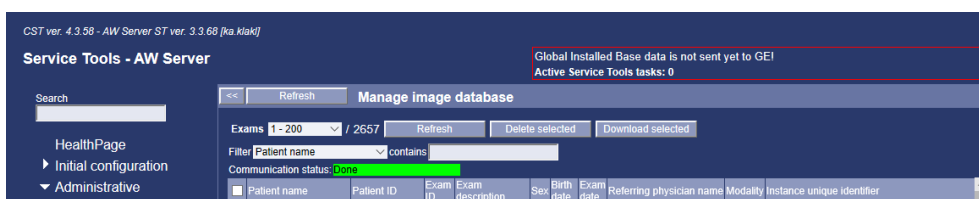


Tryck på "Filter"-knappen. Välj "Patient ID".



Skriv in personnummer i rutan "contains".

contains


Tryck sedan på "Refresh"-knappen.

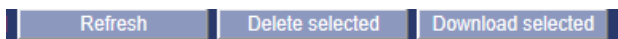

Klicka i boken framför "Patient name".

<input type="checkbox"/>	Patient name	Patient ID	Exam ID	Exam description	Sex	Birth date	Exam date	Referring physician name	Modality	Instance unique identifier
<input type="checkbox"/>	*****	*****	17676	DT BUK	M		2020-08-21		CT	

Tryck sedan på "Delete selected"-knappen

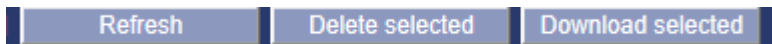

Du får en fråga om du verkligen vill radera, klicka "OK".

Från 10.51.240.103:


Are you sure you want to delete the selected exams?



Klicka "OK" igen.

Från 10.51.240.103:

The requested DICOM objects were deleted successfully!

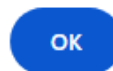

Patienten är nu raderade från AW server. Logga ut när du är klar.

Rätta på modalitet och skicka in båda patienterna till AW servern igen.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Bild o funktionsmed

Innehållsansvar: Eva Högröm, (evaho5), Röntgensjuksköterska

Granskad av: Andreas Lindgren, (andfr9), Medicinteknisk civilingenjör

Godkänd av: Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9700-757502554-258

Version: 5.0

Giltig från: 2024-11-19

Giltig till: 2026-11-18