

Gäller för: VE Bild o funktionsmed

Giltig från: 2025-02-26

Innehållsansvar: Eva Högström, (evaho5), Röntgensjuksköterska

Giltig till: 2027-02-21

Granskad av: Andreas Lindgren, (andfr9), Medicinteknisk civilingenjör

Godkänd av: Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

Revolution CT kopiera bilder till USB – handläggning

Förändringar sedan föregående version

Förlänger giltighetsdatum. Lagt till en mening under punkt 5. I övrigt inga förändringar. Ändrar innehållsgranskare till Andreas Lindgren.

Syfte


Manual för personalen Bild och Funktionsmedicin hur man kopierar till ett USB-minne på Revolution CT.

Utförande

Hämta ett USB-minne i MIV-förrådet.

1. Sätt i USB-minnet i hostdatorn eller tornet.



2. Välj önskade undersökningar och serier från File Manager (filhanteraren).
3. Från File Manager (filhanteraren) klickar du på ikonen  [Media Creator].
4. Välj USB under fliken select Media. Obs! kan heta vad som helst. Ex Produccode_2.

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.



5. Klicka i båda rutorna CD Viewer och den andra rutan. Include Image Viewer och Verify Data.
6. Tryck på Write knappen.
7. Kan komma upp en fråga att ta bort information på USB. Klicka på Ok.
8. Kan komma upp en **till** fråga att ta bort information på USB. Klicka på Ok.
9. Vänta tills det kommer upp en text Copy To Media Completed Successfully. cirka 10 minuter.
10. Tryck på exit. Dra ur USB-minnet ur datorn. Klart.

OBS! Man kan öppna USB med en CDViewer men då kommer inte alla identiteter fram på undersökningen. Komplet information kommer först när man importerar undersökningen till sitt egna PACS, ex Sjukhus, id, undersökningsnummer med mera.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Bild o funktionsmed

Innehållsansvar: Eva Högström, (evaho5),
Röntgensjuksköterska

Granskad av: Andreas Lindgren, (andfr9), Medicinteknisk
civilingenjör

Godkänd av: Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9700-757502554-280

Version: 7.0

Giltig från: 2025-02-26

Giltig till: 2027-02-21