

Gäller för: VE Bild o funktionsmed

Giltig från: 2025-02-04

Innehållsansvar: Marcus Ahlén, (marah51), Röntgensjuksköterska

Giltig till: 2027-01-31

Granskad av: Andreas Lindgren, (andfr9), Medicinteknisk civilingenjör

Godkänd av: Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

Revolution EVO, kopiera till USB - handläggning

Förändringar sedan föregående version

Förlänger giltighetsdatum. Ändrar innehållsansvarig till Marcus Ahlén.

Ändrar innehållsansvarig till Andreas Lindgren.

Syfte

Manual för personalen på Bild och Funktionsmedicin hur man kopierar till USB på Revolution EVO.


Utförande

Hämta ett USB i MIV-förrådet.

1. Sätt i USB i hostdatorn eller tornet.




2. Gå till image works, välj patient.

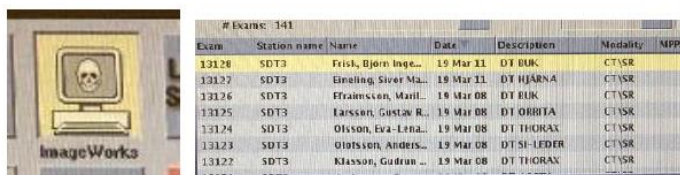

3. Gå till Data Apps/CD/DVD/USB.



4 välj i listan / Flash disk_1 (kan stå vad som helst).

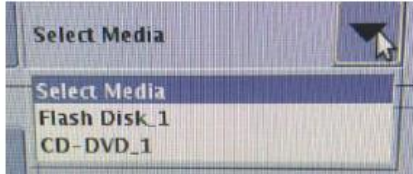

5: klicka på CD-ikonen.



6: Det kan komma upp en fråga att ta bort information på USB. Klicka på ok.

7: Det kan komma upp en till fråga att ta bort information på USB. Klicka på ok

8: Vänta till det kommer upp en text: Copy to media completed successfully. cirka 10 minuter.

9: Tryck på exit. Dra ut USB ur datorn. Klart.

OBS! Man kan öppna USB med en CD-Viewer men då kommer inte alla identiteter fram på undersökningen. Komplet information kommer först när man importerar undersökningen till sitt egna PACS t.ex. sjukhus, id, undersökningsnummer med mera.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Bild o funktionsmed

Innehållsansvar: Marcus Ahlén, (marah51),
Röntgensjuksköterska

Granskad av: Andreas Lindgren, (andfr9), Medicinteknisk
civilingenjör

Godkänd av: Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9700-757502554-281

Version: 6.0

Giltig från: 2025-02-04

Giltig till: 2027-01-31