

Gäller för: VE Bild o funktionsmed

Giltig från: 2025-09-26

Innehållsansvar: Andreas Lindgren, (andfr9), Medicinteknisk civilingenjör

Giltig till: 2027-09-26

Granskad av: Anette Carlsson, (aneka10), Röntgensjuksköterska

Godkänd av: Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

# Skicka bilder till SU när BFR eller Sectra PACS inte fungerar - handläggning

## Förändringar sedan föregående version

Förändrat bilderna (ny AW-version). Tagit bort telefonnummer till andra sjukhus på SU. Rättat Mediaenhetens kontaktuppgifter. Tagit bort sändning till SU\_KTA-BFR.

## Syfte


Instruktion riktad till personal på Bild och Funktionsmedicin Radiologi hur man går till väga när man ska skicka bilder till Sahlgrenska Universitetssjukhus (SU) när BFR eller Sectra PACS inte fungerar.

## Utförande


SU består av: Sahlgrenska, Östra Sjukhuset och Mölndals Sjukhus

När BFR eller Sectra PACS inte fungerar ska vi:

1. Skicka bilderna till Skaraborgs Sjukhus GE AW Server från modaliteten.
2. Logga in i GE AW Server: Finns på alla datorer.

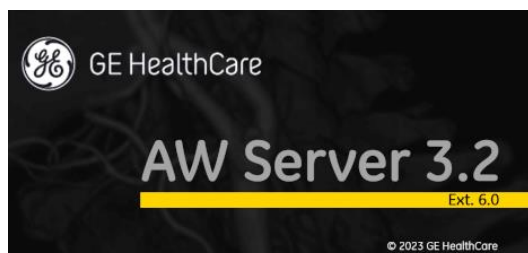

3. I patientlistan, högerklicka på patienten du vill skicka till SU AW server. Välj sedan "Sänd till: SU\_GEAwServer1Neuro".

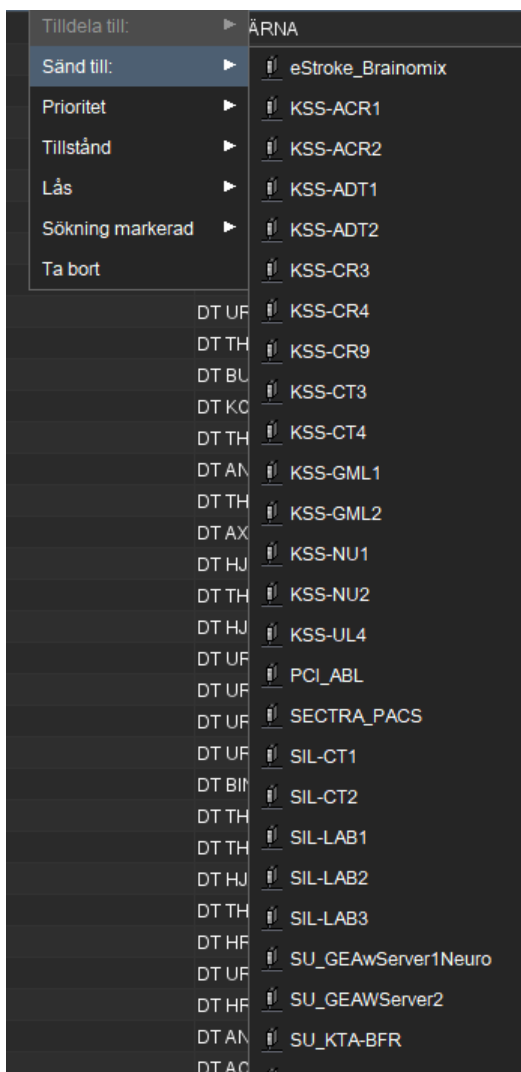

4. Gör om steg 3 fast välj ”Sänd till: SU\_GEAwServer2”.

5. Ring Röntgen på SU, tel. 031-3427150. Be dem kontrollera så bilder kommit fram till GE AW Server.

6. Ring remittenten och be dem gå till Röntgen för att se bilderna i GE AW Server.

### **Mediaenheten på SU**

(De kan också kontrollera att bilder ligger i GE AW Server.)

Telefon 031-3427132

Måndag – Fredag, kl. 08.00-11.00, 13.00-17.30

Telefon 031-3427869

Gäller endast AKUTA tjänstesamtal

Måndag – Fredag, kl. 08.00-17.30

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** VE Bild o funktionsmed

**Innehållsansvar:** Andreas Lindgren, (andfr9), Medicinteknisk  
civilingenjör

**Granskad av:** Anette Carlsson, (aneka10), Röntgensjuksköterska

**Godkänd av:** Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SKAS9700-757502554-309

**Version:** 8.0

**Giltig från:** 2025-09-26

**Giltig till:** 2027-09-26