

Gäller för: VE Bild o funktionsmed

Giltig från: 2025-12-18

Innehållsansvar: Ann-Charlotte Andersson, (annan29), Sektionsledare

Giltig till: 2028-01-22

Granskad av: Josefine Strid, (josst11), Röntgensjuksköterska

Godkänd av: Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

Spara bilder till USB-minne från Celex vid nätverksstopp – BFM radiologi

Förändringar sedan föregående version
Förlänger giltighetsdatum.

Syfte

Instruktion riktad till personal inom Bild och Funktionsmedicin
hur man sparar bilder till USB-minne på Celex vid nätverksstopp.

Utförande

Spara bilder till USB-minne.

Om bilder behöver skickas med en patient till exempelvis till SU
vid nätverksstopp.

1. Sätt i ett USB-minne i datorn.
2. Gå till PAST fliken.
3. Välj rätt undersökning/patient.
4. Tryck på knappen uppe till höger som ser ut som ett
"verktyg och ett papper"
5. Bocka ur Sectra PACS.
6. Bocka i USB.
7. Tryck på knappen Send Exam.

Detta gäller endast vald undersökning/patient.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Bild o funktionsmed

Innehållsansvar: Ann-Charlotte Andersson, (annan29),
Sektionsledare

Granskad av: Josefine Strid, (josst11), Röntgensjuksköterska

Godkänd av: Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9700-757502554-321

Version: 4.0

Giltig från: 2025-12-18

Giltig till: 2028-01-22