

Gäller för: VE Bild o funktionsmed

Giltig från: 2026-01-23

Innehållsansvar: Ann-Charlotte Andersson, (annan29), Sektionsledare

Giltig till: 2028-02-20

Granskad av: Hedvig Ødegård, (hedde1), Röntgensjuksköterska

Godkänd av: Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

Spara bilder till USB-minne från Samsung GC85A och GM85 vid nätverksstopp – BFM radiologi

Förändringar sedan föregående version
Förtydligat text gällande GC85A och GM85. Tagit bort överflödiga bilder.

Syfte


Instruktion riktad till person inom Bild och Funktionsmedicin hur man sparar bilder till USB-minne på Samsung GC85A och GM85 vid nätverksstopp.

Utförande


1. Logga in i systemet på modaliteten.
2. Stoppa in USB-minnet i modaliteten.
 - a. För GC85A (stationär) finns USB-port i datorn under bordet.
 - b. För GM85 (mobil) finns USB-port på höger sida innanför/nedanför handtaget (under lucka, se bild).




3. Tryck på **"Review"** uppe till höger på skärmen bredvid **"Worklist"** och **"Acquisition"**.

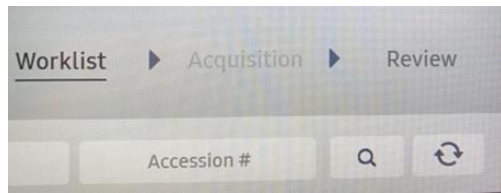

4. Markera den undersökning du vill exportera.
5. Klicka på knappen **"Export>"** i verktygsfältet längst ner till vänster.

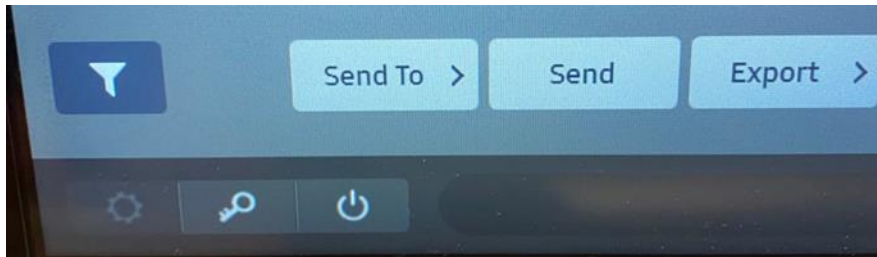


6. Vid **"Export To"** välj **"USB"**. Knappen blir aktiv när USB är tillgängligt.

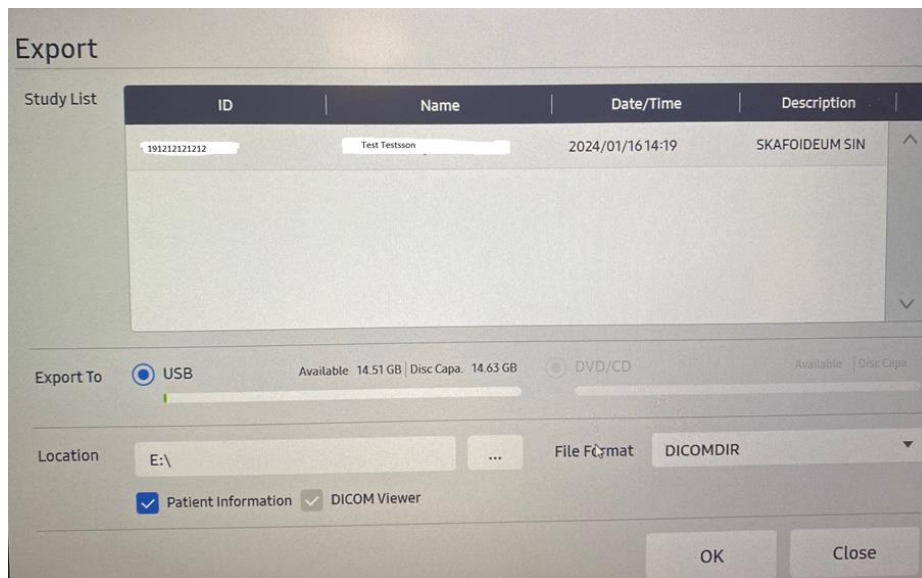

7. **"Location"** ska bli aktiv och ett namn på USB kommer upp och välj det förvalda filformatet **"DICOMDIR"**.


8. Markera även **"DICOM Viewer"** för att möjliggöra bildgranskning via USB.

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

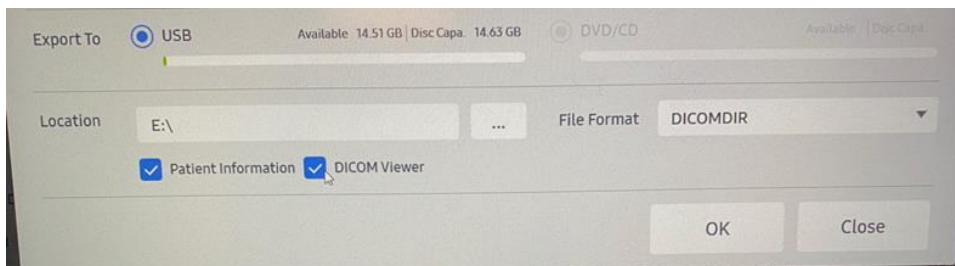

OBS! Om bilderna inte ska till en läkare eller PACS, avmarkera **"Patient Information"**.

9. Klicka **"OK"** och exporten (Saving Files) kommer starta till USB.

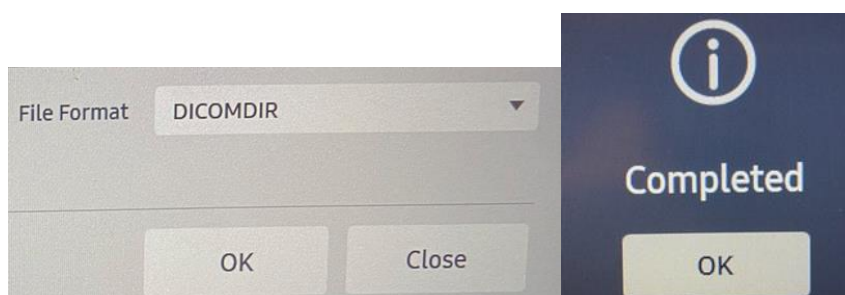

10. Ta ur USB från dator och ge till granskande radiolog eller om den ska skickas med en transport till annat sjukhus.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Bild o funktionsmed

Innehållsansvar: Ann-Charlotte Andersson, (annan29),
Sektionsledare

Granskad av: Hedvig Ødegård, (hedde1), Röntgensjuksköterska

Godkänd av: Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9700-757502554-322

Version: 5.0

Giltig från: 2026-01-23

Giltig till: 2028-02-20