

Gäller för: VE Bild o funktionsmed

Giltig från: 2024-12-20

Innehållsansvar: Petronella Jeppsson, (petje2), Systemadministratör

Giltig till: 2026-12-17

Granskad av: Anette Carlsson, (aneka10), Röntgensjuksköterska

Godkänd av: Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

Arkivering i BFR – BFM Radiologi

Förändringar sedan föregående version

Förlänger giltighetsdatum.

Bakgrund och syfte


Arkivera i BFR.

Utförande

Undersökningar blir normalt arkiverade i BFR när de definitivsigneras. Om det krävs en tidigarelagd arkivering kan man manuellt arkivera Med nedanstående metod läggs undersökningen i kö för arkivering, detta är alltså inte ett sätt att sända akuta undersökningar.

Logga in i IDS7.

Öppna informationsfönstret och klicka på Sök

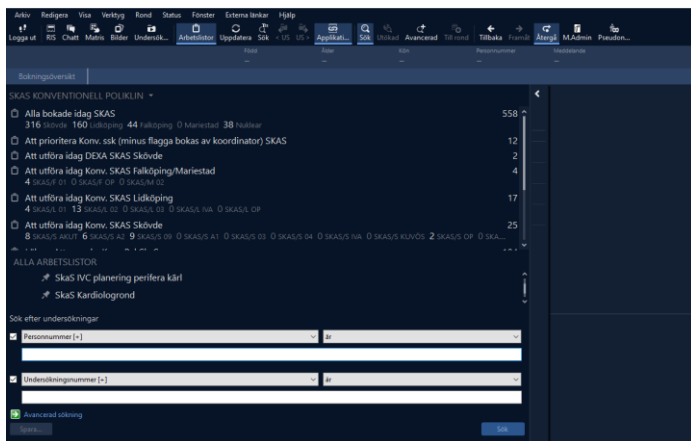

Gör en sökning på patientens personnummer.

Sökresultat

Sök efter undersökningar

Personnummer [+]

195005251599

Undersökningsnummer [+]

Avancerad sökning

Spara...

Om det finns undersökningar på sökt patient visas patientens namn i arbetslistan.

Sökresultat / 1 patient, 1173 undersökningar

Personnummer ↕2 Namn ↑1 Institution Kort (VGR W)

| | |
|---------------|-------------------------|
| 19500525-1599 | ASYNJASSON, ANTON Algot |
|---------------|-------------------------|

Markera patientens namn i listan för att visa de undersökningar som finns.

Historik / 76 patienter, 96 undersökningar

Öppnad #1 Personnummer Namn Beskrivning Institution Kort (... Kod) Kön Modal...

| | | | | | | |
|-------------------|-------------|-----------------------|--------------------|--------|---|--|
| 2022-12-12, 14:45 | 19500525... | ASYNJASSON, ANTON ... | Bentätthetsmätning | 209601 | M | |
|-------------------|-------------|-----------------------|--------------------|--------|---|--|

Patienthistorik för ASYNJASSON, ANTON Algot / 1879 undersökningar, 7 matchar arbetslistan

Some results cannot be shown due to errors in the result. Klicka här för detaljer.

| Förl... | Beskrivning | Institution Ko... | #1 Remissnummer | Undersökningsnummer | Modal... | Kod |
|---------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|----------|-----|
| DT knäled Vänster | | SERKUN0017237341 | SERKUN0021164305 | SR | 869000 | |
| Lungor | | SERKUN0017250974 | SERKUN0021182760 | | 320000 | |
| Armbåge Höger | | SERKUN0017302830 | SERKUN0021251398 | | 634000 | |
| Bentätthetsmätning | | SERKUN0017302830 | SERSKO0021279582 | 209601 | | |
| Urinvägsöversikt | | SERKUN0017312058 | SERKUN0021263455 | | 501000 | |
| Lungor | | SERLBY0005363782 | SERLBY0006661762 | | | |
| Överarm | | SERLBY0005363796 | SERLBY0006661778 | | | |

Markera den undersökning som ska arkiveras(”skickas”) och högerklicka på raden.

Patienthistorik för ASYNJASSON, ANTON Algot / 1879 undersökningar, 7 matchar arbetslistan

Some results cannot be shown due to errors in the result. Klicka här för detaljer.

| Förl... | Beskrivning | Institution Ko... | #1 Remissnummer | Undersökningsnummer | Modal... | Kod |
|---------------|-------------|-------------------|-----------------|---------------------|------------------|-----|
| Armbåge Höger | | | | 01879841 | SERANS0001602093 | |
| DT buk med i | | | | 01893988 | SERKUN0001620651 | |
| DT buk | | | | 01893989 | SERKUN0001620652 | |
| DT buk | | | | 01893990 | SERKUN0001620653 | |
| DT buk med i | | | | 01893991 | SERKUN0001620654 | |

Context menu options:

- Sätt som aktuell undersökning
- Granskande läkare
- Status
- Undersökningskommentarer...
- Scanna in dokument
- Importera
- Hämta från arkiv
- Arkivera
- Exportera till media...
- Skicka till teleradiologidestination...
- Publicera till
- Skriv ut undersökning...
- Rond
- Lägg till i arbetslista...
- Ta bort från arbetslistan
- Del
- Utbildningsfall...
- Skapa anonym kopia

Klicka sedan på ”Arkivera”, undersökningen blir nu lagd i kö för manuell tidigarelagd arkivering och kommer att bli tillgänglig för den som söker i BFR.

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Bild o funktionsmed

Innehållsansvar: Petronella Jeppsson, (petje2),
Systemadministratör

Granskad av: Anette Carlsson, (aneka10), Röntgensjuksköterska

Godkänd av: Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9700-757502554-39

Version: 6.0

Giltig från: 2024-12-20

Giltig till: 2026-12-17