

Gäller för: VE Bild o funktionsmed

Giltig från: 2026-04-01

Innehållsansvar: Marie Eng, (maren57), Röntgensjuksköterska

Giltig till: 2028-03-28

Granskad av: Andreas Kennberg, (andke3), Medicinteknisk ingenjör

Godkänd av: Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

Manuell inmatning på Philips Allura Xper FD 10-series

Förändringar sedan föregående version

Förlänger giltighetsdatum.

Sammanfattning

Vid driftstopp. Rutin hur man manuellt registrerar patientdata på modalitet på PCI/Ablationslab.

Bakgrund och syfte

Reservrutin vid driftstopp av Sectra RIS/PACS. Registrering av patientdata på modalitet vid driftstopp för att kunna utföra undersökningar.

Förutsättningar

Om Sectra RIS/PACS ligger nere.

Avgränsningar

Dokumentet är avsett för vårdpersonal som arbetar på PCI-lab/Ablation, Interventionscentrum, Skövde, med Phillips Allura Xper FD10-series.

Lokaler

PCI/ Ablationlab interventionscentrum SkaS Skövde.

Utrustning

Phillips Allura Xper FD10-series.

Arbetsbeskrivning PCI/Ablation Skövde

När Sectra RIS/PACS av någon anledning inte fungerar så kan modalitet Phillips Allura Xper FD10-series på PCI-lab/Ablation inte

inhämta korrekt patientidentifikation från arbetslisthanteraren. Då behöver patientdata matas in manuellt.

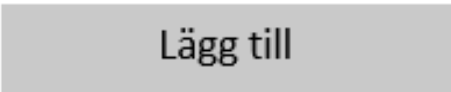
Remissen kan läsas i Informationsvisaren (BFR)

Tillvägagångssätt:

1. Klicka på datafunktionsknappen [schemalägg] på datamonitorn.

A rounded rectangular button with an orange background and the text "Schemalägg" in white.

2. Klicka på datafunktionsknappen [lägg till] på datamonitorn.

A rectangular button with a light gray background and the text "Lägg till" in black.

3. Mata in relevant patientdata (**Patient-ID** är det viktigaste).

Om röntgenremiss finns men inte kan inhämtas korrekt av arbetslisthanteraren, fyll även i remiss och undersökningsnummer, börjar ofta på SERSKO. Detta på grund av att remiss och bildmapp då automatiskt kopplas ihop efter avslutad undersökning.

4. Bekräfta patientuppgifterna genom att klicka på datafunktionsknappen [OK].

A rectangular button with a light gray background and the text "OK" in black.

5. Klicka på datafunktionsknappen [välj för bildtagning].

A rectangular button with a light gray background and the text "Välj för bildtagning" in black.

6. Nu kan undersökningen påbörjas.

Skicka bilder till AW-server och Sectra Arkiv.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Bild o funktionsmed

Innehållsansvar: Marie Eng, (maren57), Röntgensjuksköterska

Granskad av: Andreas Kennberg, (andke3), Medicinteknisk
ingenjör

Godkänd av: Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9700-757502554-571

Version: 2.0

Giltig från: 2026-04-01

Giltig till: 2028-03-28