

Gäller för: VE Bild o funktionsmed

Giltig från: 2024-12-11

Innehållsansvar: Kent Magnusson, (kenma3), Medicinteknisk ingenjör

Giltig till: 2026-12-11

Granskad av: Andreas Lindgren, (andfr9), Medicinteknisk civilingenjör

Godkänd av: Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

# Oplanerat strömavbrott, SkaS Lidköping – BFM Radiologi

## Förändringar sedan föregående version

Förtydligande av eluttagsmärkning.

## Syfte

Att tydliggöra rutin för apparatur vid oplanerat strömavbrott på Bild och Funktionsmedicin radiologi SkaS Lidköping.

## Förutsättningar

### Ansvar

Om strömavbrottet varar mer än 60 min kontakta Tjänsteman i Beredskap (TiB), 0500 - 432840, sökare 0746–212636. Återkoppla till TiB när strömmen är åter.

## Utförande

Datorer på avbrottsfri kraft störs inte av att strömmen kommer och går.

Datorer på ej avbrottsfri kraft kommer att stängas av men kan startas när strömmen kommer åter. **OBS** Inga modaliteter går på avbrottsfri kraft.

### Magnetkameran

MR, Magnetkameran ström försörjs från teknikrummet intill Magnetkameran.

Öppna plåtskåpet som står direkt till vänster om man går in från korridoren.

Följ instruktionerna för att göra en "Shut down", d.v.s. stäng av strömbrytarna som visas på instruktion om avstängning.

När detta är gjort tryck på den gröna knappen på väggen i manöverrummet och grön indikatorlampa kommer att lysa.

Följ instruktionerna för ”Power on”, slå på brytarna i rätt ordning och vänta 5 sekunder mellan varje steg i instruktionen.

### **Lab 3**

Starta strömmen genom att trycka på den gröna knappen på väggen i manöverrummet.

Om Celex ska startas tryck på den gröna knappen på höger sida av konsolen.

### **Lab 1 och Lab 2, Samsunglabben**

Tryck på knappen benämnd start på plåtskåpet inne på labbet.

Starta labbet som vanligt från manöverrummet. På konsolen är det den översta knappen.

### **LDT1 och LDT2**

Tryck på den gröna knappen på plåtskåpet som sitter på väggen i labbet.

### **Angående olika färg på eluttag**

**Brunt uttag:** Avbrottsfri kraft. Alltid ström på.

**Grönt uttag:** Reservkraft. Ström i eluttaget efter 10–20 sekunder när reservkrafts aggregaten har startat.

**Vitt uttag:** Normalkraft. Ström i eluttaget 10–30 sekunder efter att grönt uttag har ström.

### **Frågor under strömavbrottet**

Ring till Västfastigheters beredskapstelefon 0705-568 05 33.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** VE Bild o funktionsmed

**Innehållsansvar:** Kent Magnusson, (kenmag), Medicinteknisk  
ingenjör

**Granskad av:** Andreas Lindgren, (andfr9), Medicinteknisk  
civilingenjör

**Godkänd av:** Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SKAS9700-757502554-629

**Version:** 2.0

**Giltig från:** 2024-12-11

**Giltig till:** 2026-12-11