

Gäller för: VE Bild o funktionsmed

Giltig från: 2026-04-20

Innehållsansvar: Amanda Andersson, (amaan20), Röntgensjuksköterska

Giltig till: 2027-09-18

Granskad av: Petronella Jeppsson, (petje2), Systemadministratör

Godkänd av: Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

Manuell inmatning på CBCT lab i Skövde

Förändringar sedan föregående version

Ny rutin.

Sammanfattning

Rutin hur man manuellt registrerar patientdata på modalitet CBCT, vid driftstopp.

Bakgrund och syfte

Reservrutin vid driftstopp av Sectra RIS/PACS. Registrering av patientdata på modalitet vid driftstopp för att kunna utföra undersökningar.

Förutsättningar

Om Sectra RIS/PACS ligger nere.

Avgränsningar

Dokumentet är avsett för vårdpersonal som arbetar på CBCT.

Lokaler

CBCT lab på SkaS Skövde


Arbetsbeskrivning

När Sectra RIS/PACS av någon anledning inte fungerar så kan modalitet CBCT inte inhämta korrekt patientidentifikation från arbetslisthanteraren. Då behöver patientdata matas in manuellt.


Remissen kan läsas i Informationsvisaren (BFR) Om den finns i systemet (Kort och kod). Annars gäller pappersrutin

Tillvägagångssätt:

Tryck på knappen Sök patient (Längst ner till vänster)

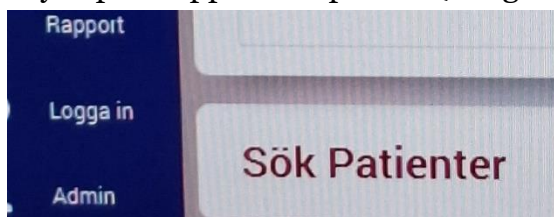


Ny ruta öppnas. Tryck på Lägg till Patient (Längst upp till vänster)

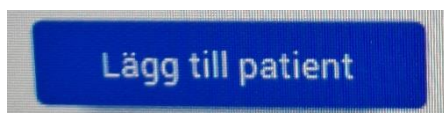

Nytt fönster öppnas

Registrera patient information

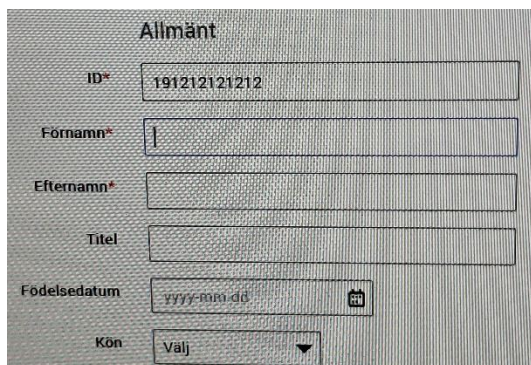

ID* (ååååmmddxxxx) 12 siffror inget bindestreck


Förnamn: (alla om det finns, och du har tid)

Efternamn:

Födelsedatum: åååå-mm-dd

Kön: man/kvinna/okänd

Spara: (Längst ner till höger)

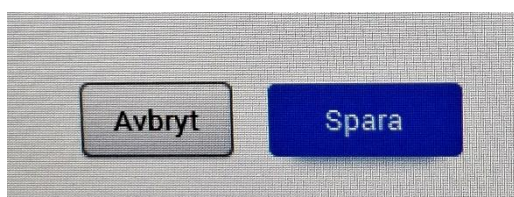

Undersökningsfönstret öppnas. Välj undersökning som vanligt.

Bilder skickas till GE AW server. Efter avbrottet skickas det till SkaS
Sectra arkiv.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Bild o funktionsmed

Innehållsansvar: Amanda Andersson, (amaan20),
Röntgensjuksköterska

Granskad av: Petronella Jeppsson, (petje2),
Systemadministratör

Godkänd av: Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9700-757502554-677

Version: 2.0

Giltig från: 2026-04-20

Giltig till: 2027-09-18