

Nedstängning och uppstart av Akut-DT – GE Revolution Apex

Förändringar sedan föregående version
Nytt dokument.

Syfte

Hur man stänger av och startar upp datortomograferna på akutradiologin, ADT1 och ADT2 - GE Revolution Apex.

Utförande

Avstängning

I menyn högst upp på den högra monitorn klicka på symbolen längst till vänster och gå till **Power Management > Power Down**.

Du kommer varnas att systemet kommer stängas av och att man ska se till att pågående undersökningar, rekonstruktioner och överföringar till PACS är avslutade.

Det tar c:a 30-40 minuter att stänga av systemet beroende på hur pass varmt systemet är.

Efter att gantry och hostdator är avstängda kan man fortsätta med följande.

Gå in i undersökningsrummet och öppna dörrarna till tekniknischen.

Lokalisera elskåpet och börja med att stänga av kontaktorn ”CONTACTOR OFF/ON”. Se bild 1–3 på nästa sida.


1. Elskåp DT



2. Kontaktor



3. Vrid kontaktor till vänster

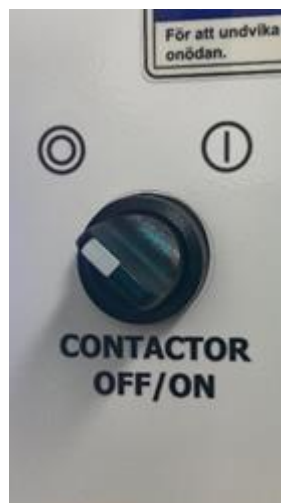

Stäng sedan av huvudbrytaren "MAIN DISCONNECT". Se bild 4–5.

4. Huvudströmbrytare



5. Huvudströmbrytare AV




Nu är hela systemet avstängt inklusive UPS.

Uppstart

Gå in i undersökningsrummet och öppna dörrarna till tekniknischen.

Lokalisera UPS och ställ vredet i SERVICE-läge. Se bild 6–7.

6. UPS

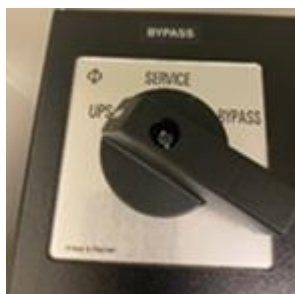

7. Vrid till SERVICE



På elskåpet, vrid huvudströmbrytaren ”MAIN DISCONNECT” till ON-läge. Se bild 8–10.

8. Elskåp DT



9. Huvudströmbrytare




10. Vrid till ON-läge




Vrid "CONTACTOR OFF/ON" till ON-läge. Se bild 11–12.

11. Kontaktor

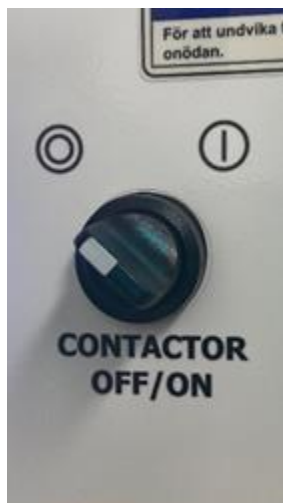

12. Vrid till ON-läge

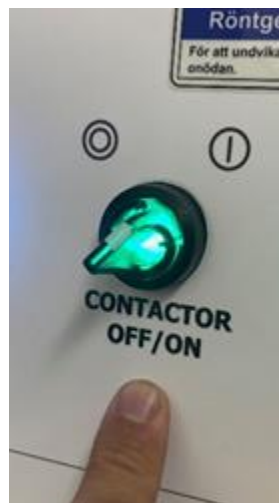

1. Vänta en stund och kontrollera displayen på UPS:ens framsida. Ska se ut som bilden här.



På UPS:ens ovansida finns ett reglage för "BATTERY". För denna framåt. Se bild 14–15.


14. UPS BATTERY AV



15. Pressa uppåt till ON-läge



2. Kontrollera displayen igen och vänta tills den understa röda lampan slocknat. Ska se ut som på bilden här:

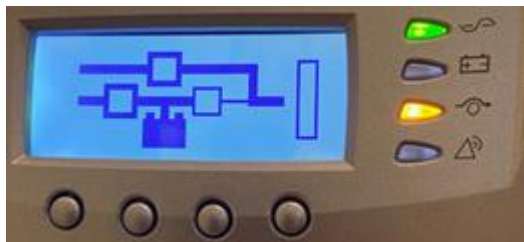

När detta är klart ska UPS-vredet ställas tillbaka till UPS igen. Se bild 17–18.

16. SERVICE-läge



17. Vrid till UPS



3. Endast den gröna lampan ska vara aktiv på UPS:en som



enligt bilden.

4. Efter ett tag när hostdator och gantrydatorn (display på gantry) har startat trycker man på knappen på gantryt för återställning (E-stop reset).



OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Varningsruta om "E-stop has been activated" kan förekomma men denna kan klickas bort (Ok) då det åtgärdades i föregående steg.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Bild o funktionsmed

Innehållsansvar: Andreas Kennberg, (andke3), Medicinteknisk
ingenjör

Granskad av: Eva Högström, (evaho5), Röntgensjuksköterska

Godkänd av: Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9700-757502554-695

Version: 1.0

Giltig från: 2025-11-24

Giltig till: 2027-11-24