

Gäller för: VE Bild o funktionsmed

Giltig från: 2025-11-24

Innehållsansvar: Andreas Kennberg, (andke3), Medicinteknisk ingenjör

Giltig till: 2027-11-24

Granskad av: Eva Högström, (evaho5), Röntgensjuksköterska

Godkänd av: Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

Nedstängning och uppstart av SDT3 - GE Revolution Ascend

Förändringar sedan föregående version

Ny rutin.

Syfte

Hur man stänger av och startar upp GE Revolution Ascend - SDT3/LDT1.

Utförande

Avstängning

I menyn högst upp på den högra monitorn klicka på symbolen längst till vänster och gå till Power Management > Power Down.

Du kommer varnas att systemet kommer stängas av och att man ska se till att pågående undersökningar, rekonstruktioner och överföringar till PACS är avslutade.

Efter att gantry och hostdator är nedstängda kan man fortsätta med följande.

Stäng av strömmen genom att trycka in den röda kontaktorn på väggen i manöverrummet, till höger om fönstret.

När denna tryckts in kan den sedan dras ut igen.



Uppstart

Tryck in den gröna knappen på kontaktorn, grön lampa ska tändas.

Systemet startar nu upp av sig själv - vänta tills allt laddat färdigt och startat upp.

En varning visas på både hostdatorn och gantry-displayen. Tryck på återställningsknappen, antingen på gantryt eller konsollen inne i manöverrummet, för E-stop reset.



Nu är systemet redo för användning.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Bild o funktionsmed

Innehållsansvar: Andreas Kennberg, (andke3), Medicinteknisk
ingenjör

Granskad av: Eva Högström, (evaho5), Röntgensjuksköterska

Godkänd av: Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9700-757502554-696

Version: 1.0

Giltig från: 2025-11-24

Giltig till: 2027-11-24