

Nedstängning och uppstart av SDT4 – GE Revolution Apex

Förändringar sedan föregående version

Ny rutin.

Syfte

Instruktion om hur man stänger av och startar upp datortomografen SDT4, GE Revolution Apex.

Utförande

Avstängning

I menyn högst upp på den högra monitorn klicka på symbolen längst till vänster och gå till **Power Management > Power Down**.

Du kommer varnas att systemet kommer stängas av och att man ska se till att pågående undersökningar, rekonstruktioner och överföringar till PACS är avslutade.

Det tar c:a 30–40 minuter att stänga av systemet beroende på hur pass varmt systemet är.

Vänta tills gantry och hostdator (se monitorer) är avstängda.

För att även UPS:en ska stängas av, tryck på den röda knappen på kontaktorn i manöverrummet.




Uppstart

Om UPS och kontakter stängts av så börja med att aktivera kontaktorn. Dra ut nödstoppet och tryck på den gröna knappen på kontaktorn.



Lokalisera UPS och ställ BYPASS-vredet i SERVICE-läge. Se bild 1-2.

1. UPS

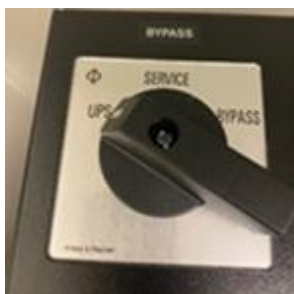

2. Vrid till SERVICE



För sedan reglaget för "BATTERY" framåt/uppåt.

3. UPS BATTERY AV



4. Vrid till ON-läge



1. Kontrollera displayen - när grön lampa blinkar och gul lampa lyser fast kan man fortsätta till nästa steg. Ska se ut som på bilden:

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.



Vrid tillbaka BYPASS-vredet till UPS igen.

5. SERVICE-läge



6. Vrid till UPS



2. Displayen ska nu se ut som enligt bilden och den gula lampan ska ha slocknat.



7. Hostdatorn startar automatiskt.

3. Efter ett tag när host- och gantrydator (display på gantry) har startat trycker man på knappen på gantryt för återställning (E-stop reset) som blinkar grönt.



OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Varningsruta om "E-stop has been activated" kan förekomma men denna kan klickas bort (Ok) då det åtgärdades i föregående steg.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Bild o funktionsmed

Innehållsansvar: Andreas Kennberg, (andke3), Medicinteknisk ingenjör

Granskad av: Eva Högström, (evaho5), Röntgensjuksköterska

Godkänd av: Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9700-757502554-697

Version: 1.0

Giltig från: 2025-11-24

Giltig till: 2027-11-24