

# GE Logiq E10 – rensa hårddisken från gamla undersökningar


## Förändringar sedan föregående version

Ny rutin.

## Syfte

Utförda undersökningar sparas på hårddisken i ultraljudsmaskinen. För att undvika att hårddisken blir full, tar man manuellt bort gamla undersökningar. I Skövde har man sparat senaste månadens utförda undersökningar.

## Utförande

- Starta ultraljudsmaskinen.
- Klicka på **PATIENT** på touchskärmen.
- Patient ska vara blåmarkerad i vänstra hörnet på bildskärmen.
- Klicka på **Hide**.
- Sortera listan genom att klicka på **Last exam**-kolumnen.
- Markera äldsta remissen genom att ställa pilen på äldsta remissen och högerklicka.
- Ta pilen och scrolla nedåt i listan.
- Håll in shiftknappen  och ställ pilen på den sista undersökningen och högerklicka. Alla undersökningar blir nu blåmarkerade.
- Välj **Delete**.
- Varningsruta visas - välj **OK**.

Är det många undersökningar tar det lite tid för maskinen att ta bort dessa.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** VE Bild o funktionsmed

**Innehållsansvar:** Sofia Thimberg, (softh3), Sjuksköterska

**Granskad av:** Andreas Kennberg, (andke3), Medicinteknisk  
ingenjör

**Godkänd av:** Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SKAS9700-757502554-726

**Version:** 1.0

**Giltig från:** 2026-03-23

**Giltig till:** 2028-03-19