

# GE Logiq E10 – exportera till USB vid nätverksstopp

## Förändringar sedan föregående version

Ny rutin.

## Syfte

Instruktion för exportering av bilder från GE Logiq E10 till USB-minne då överföring av bilder via nätverk inte är möjlig.

## Förutsättningar

Nytt, tomt USB-minne med format FAT32 krävs för exportering av bilder.

## Utförande

- Använd ett USB-minne som finns i den blåa pärmen på respektive ultraljudsmaskin eller i reservrutinspärmen.
- Sätt i USB-minnet i uttaget ovanför startknappen, till vänster om touchpanelen eller i övre skärmen på höger sida.
- Klicka på **PATIENT** på touchskärmen.
- Klicka på **Data Transfer**.
- Välj Task: **Export**.
- Välj To: **USB Drive F**.
- Välj aktuell patient i listan till höger, notera att denna rad blir blåmarkerad.
- Klicka på **Transfer** under patientfönstret.

Efter genomförd exportering kan USB-minnet avlägsnas och användas för att exempelvis importera bilderna i Sectra PACS.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** VE Bild o funktionsmed

**Innehållsansvar:** Andreas Kennberg, (andke3), Medicinteknisk ingenjör

**Granskad av:** Sofia Thimberg, (softh3), Sjuksköterska

**Godkänd av:** Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SKAS9700-757502554-727

**Version:** 2.0

**Giltig från:** 2026-04-20

**Giltig till:** 2028-04-20