

Gäller för: VE Bild o funktionsmed

Giltig från: 2026-04-01

Innehållsansvar: Andreas Kennberg, (andke3), Medicinteknisk ingenjör

Giltig till: 2028-03-31

Granskad av: Sofia Thimberg, (softh3), Sjuksköterska

Godkänd av: Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef


GE Logiq E10 – lägga till patientdata på anonym undersökning

Förändringar sedan föregående version
Ny rutin.

Syfte

Instruktion för redigering av patientdata om undersökning utförts som emergency-undersökning.

Utförande

- Tryck på **PATIENT** på pekskärmen.
- Klicka på **Hide** till höger.
- Sök upp aktuell undersökning och dubbelklicka.
- Tryck på **Freeze** för att öppna undersökningsfönstret.
- Tryck på  -knappen för att ta fram markören.
- Välj och ta fram en av de tagna bilderna till vänster.
- Tryck på **Abc**-knappen på panelen och flytta markören under bilden.
- Skriv in namn och personnummer.
- Tryck **P1** för att skapa en ny bild med angiven information.
- Tryck **END EXAM** på touchpanelen.
- Tryck på **End Current Patient**.
- Kontakta RIS/PACS-gruppen för sammankopplande av bilder och remiss.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Bild o funktionsmed

Innehållsansvar: Andreas Kennberg, (andke3), Medicinteknisk ingenjör

Granskad av: Sofia Thimberg, (softh3), Sjuksköterska

Godkänd av: Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9700-757502554-728

Version: 1.0

Giltig från: 2026-04-01

Giltig till: 2028-03-31