

Gäller för: VE Bild o funktionsmed

Giltig från: 2026-04-01

Innehållsansvar: Andreas Kennberg, (andke3), Medicinteknisk ingenjör

Giltig till: 2028-03-31

Granskad av: Sofia Thimberg, (softh3), Sjuksköterska

Godkänd av: Christian Göransson, (chrge6), Verksamhetschef

GE Logiq E10 - uppstart, ta fram och avsluta bokad remiss och nedstängning

Förändringar sedan föregående version
Ny rutin.

Syfte

En beskrivning om hur ultraljudsmaskinen startas och stängs av samt hur man tar fram en bokad remiss inför undersökning.

Utförande


Uppstart

- Kontrollera att ström- och nätverkskabel är anslutna mellan ultraljudsmaskin och respektive vägguttag.
- Tryck en kort gång på ON/OFF-knappen till vänster på panelen.
- Vänta c:a 1-2 minuter på att systemet startar upp.



Ta fram bokad remiss


- Tryck på **PATIENT** till vänster på pekskärmen.
- I Patient-fönstret ska **Patient** vara valt (blåmarkerat).
- Klicka på Worklist i vänstra spalten. Flytta pilen med hjälp av trackballen/kulan.

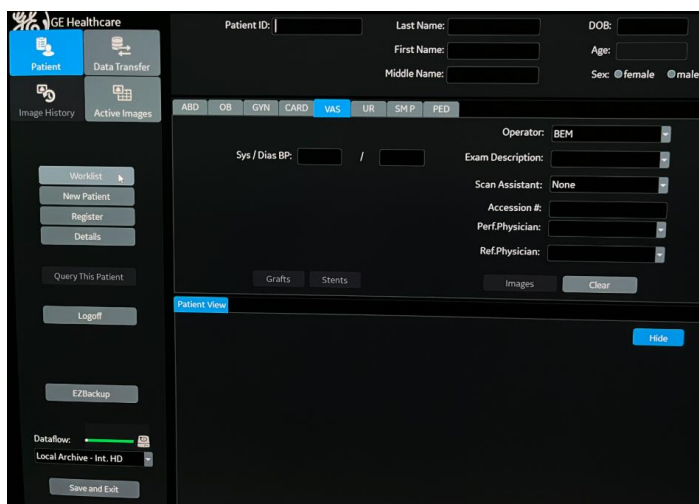

- Markera aktuell patient/undersökning i listan med markören.
- Dubbelklicka på vald patient för att öppna informationsfönstret.
- Välj utförande radiolog/operator. Lista på radiologer finns i transparenta lådan på ultraljudet.
- För att starta undersökningen trycker man på **Freeze**-knappen på panelen.

Avsluta undersökning

- Tryck på **END EXAM** på touchskärmen.
- Tryck på **End Current Patient**.

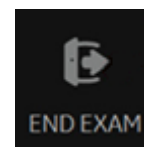

Avstängning

- Se till att tidigare undersökning är avslutad.
- Kontrollera att operatörspanelen är låst/i parkerat läge innan du stänger av systemet. Det går inte att låsa operatörspanelen efter att systemet har stängts av. Om du stänger av systemet utan att låsa operatörspanelen visas meddelandet "The operator keyboard is not in parked position".
- Tryck en kort gång på **ON/OFF**-knappen för avstängning.
- Klicka på **Shutdown**.



Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Bild o funktionsmed

Innehållsansvar: Andreas Kennberg, (andke3), Medicinteknisk
ingenjör

Granskad av: Sofia Thimberg, (softh3), Sjuksköterska

Godkänd av: Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9700-757502554-729

Version: 1.0

Giltig från: 2026-04-01

Giltig till: 2028-03-31