

Gäller för: VE Bild o funktionsmed

Giltig från: 2024-10-01

Innehållsansvar: Marcus Ahlén, (marah51), Röntgensjuksköterska

Giltig till: 2026-10-01

Granskad av: Andreas Lindgren, (andfr9), Medicinteknisk civilingenjör

Godkänd av: Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

CT Revolution EVO – omstart samt nedstängning vid planerade-oplanerade strömavbrott, SkaS Lidköping

Förändringar sedan föregående version

Förlänger giltighetsdatum. Reviderad efter Lidköpings installation.


Ändrar rubriken. Ändrar innehållsansvarig till Marcus Ahlén. Ändrar innehållsgranskare till Andreas Lindgren.

Syfte

Hur man startar om CT Revolution EVO i Lidköping vid planerat-oplanerat strömavbrott eller vid tekniska problem.


Utförande

Välj **shutdown**, markera shutdown enligt bild.

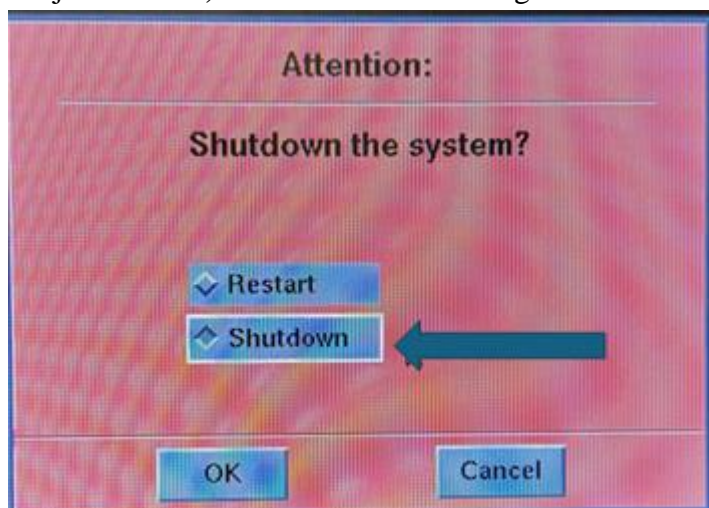

Tryck **OK** och sedan tryck **confirm** på nästa meddelande som kommer upp.

Vänta tills det står System halted på den högra skärmen.

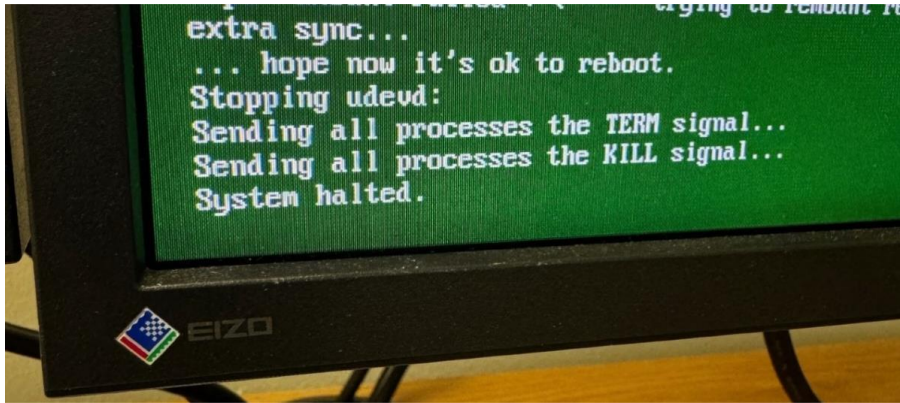

Gå in i manöverrummet och tryck på röd knapp **OFF PLANERAT STRÖMAVBROTT**



Vänta minst 1 minut innan system sätts igång alternativt tills det planerade strömavbrottet är klart.


Upstart

Om nödstopp har aktiverats dra först ut det.

Tryck på grön knapp **ON PLANERAT STRÖMAVBROTT**. Host, CT och manöverdatorer startar nu automatiskt.



Vänta tills denna ruta kommer upp i manöverrummet.

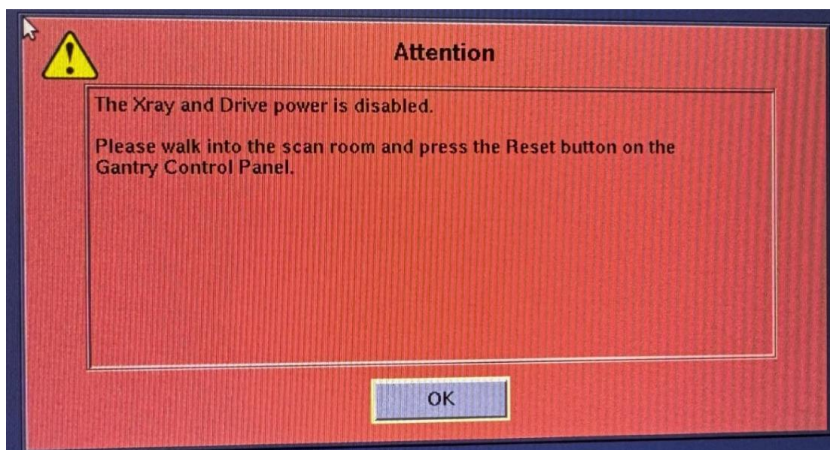

Tryck **OK**.

Gå in till gantryt och tryck på **Reset-knappen**, markerad nedan tills symbolen på gantry-skärmen slutar blinka.



Kör en **Tube warm-up** som vanligt om det behövs.

Om CT:n har varit avstängd en längre stund har röret blivit kallt och kommer behöva en längre stund för uppvärmning innan patienter kan börja köras. Du kommer då få upp en varningsruta med en tidsangivelse, vänta denna tid innan patienter börjar scannas, cirkaa 30 minuter.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Bild o funktionsmed

Innehållsansvar: Marcus Ahlén, (marah51), Röntgensjuksköterska

Granskad av: Andreas Lindgren, (andfr9), Medicinteknisk civilingenjör

Godkänd av: Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9700-757502554-90

Version: 7.0

Giltig från: 2024-10-01

Giltig till: 2026-10-01