

Gäller för: VE Akut AVA Ambulans, VE Kard Inf Hud Njur Gastro

Giltig från: 2024-11-06

Innehållsansvar: Bo Fors, (bofo), Specialsjuksköterska

Giltig till: 2026-11-06

Granskad av: Erik Frick, (erifr), Processchef

Godkänd av: Andreas Lestander Melin, (andle15), Verksamhetschef

Maxim – inhalation - kardiologi

Revideringar i denna version

Förlängd giltighet.

Bakgrund, syfte och mål

Bronkvidgande: Akutbehandling.

Maxin är en högeffektiv-nebulisator som bildar aerosol av inhalationsvätskor med komprimerad gas som drivkälla och arbetar kontinuerligt.

Arbetsbeskrivning

Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.

Aerosolen som samlas i dospåsen tillförs automatiskt i början av varje andetag utan knapptryckning och dospåsen behöver inte fyllas helt mellan andetag. Munstyckets backventil förhindrar utandningsluften att komma in i överdel och fotflaska. Munstycket monteras med utandningshålet nedåt.

Dosering:

Vuxna: kroppsvikt över 35 kg

Dosering enl. ordination.

Blandning:

Drivkälla är ett centralt gasuttag (luftuttag).

2 min inhalation + upprepas efter 15 minuters uppehåll.

Det förbrukas ca 0,25 ml vätska/min med Maxin och maximal fyllnadsvolym är 5 ml. Kasta den vätska som blir över efter inhalation.

Rengöring:

Dospåsen är engångs och byts efter varje inhalation.

Så här rengörs dimbildaren efter varje inhalation:

- Sätt sugröret i vatten med drivgasen på.
- Blås dimma i 4-5 sek, sedan luft lika länge.

Munstycke, överdel och fotflaska tål handdisk, spol/diskmaskin, M-sprit och flertalet desinfektionsmedel. Munstycket ska bytas efter två till tre månaders användning.

Arbetsgrupp

Bo Fors, sjuksköterska på Kardiologkliniken SkaS Skövde

Läkemedelsteamet, Kardiologkliniken SkaS Skövde

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Akut AVA Ambulans, VE Kard Inf Hud Njur Gastro

Innehållsansvar: Bo Fors, (bofo), Specialsjuksköterska

Granskad av: Erik Frick, (erifr), Processchef

Godkänd av: Andreas Lestander Melin, (andle15), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9709-121726567-76

Version: 8.0

Giltig från: 2024-11-06

Giltig till: 2026-11-06