

Gäller för: VE Kard Inf Hud Njur Gastro

Giltig från: 2025-09-19

Innehållsansvar: Ida Pontén, (idapo1), Enhetschef

Giltig till: 2027-09-16

Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad

Godkänd av: Christoffer Larsson, (chrla26), Verksamhetschef

# Storstädning av dialysmaskin - njursjukvård

## Revideringar i denna version

Förlängs i oförändrad version.

## Syfte

GMP-dokument (Good Manufacturing Practice). Beskriva rutin vid storstädning av dialysmaskin på Dialysmottagningen Skaraborgs Sjukhus Skövde, SkaS Skövde.

## Ansvar

All personal på Dialysmottagningen är ansvariga för storrengöring av dialysmaskinerna.

Detta görs en gång var sjätte vecka enligt bilaga [Storstädning av dialysmaskin, Signeringslista](#) som finns i GMP-rummet.

Provtagningsansvarig undersköterska ansvarar för att listan är aktuell och uppdaterad.

Storrengöringen dokumenteras i loggbok för respektive maskin och på signeringslistan.

## Arbetsbeskrivning

Storstädning av samtliga dialysmaskiner sker enligt nedan:

- Lägg dialysatkopplingarna i en hink med avjoniserat vatten.
- Torka av i och runt bikarbonathållaren med avjoniserat vatten. Lägg bikarbonatpröten upp och ner med handtagen i en hink med avjoniserat vatten.
- Torka med avjoniserat vatten på alla ytor på maskinen.
- Torka droppställningen.
- Torka av alla sladdar och vatten- och avlopps-slangar.
- Gör rent blodtrycksmanschetten.

- Kör papperskorgen i spolen.
- Skriv in i loggboken och på signeringslistan.

Kör ett värmedesinfektionsprogram och sprita av ytorna efter storstädning!

## Arbetsgrupp

*Innehållsansvarig*

Anna Wärme, Överläkare, Njurmedicinska kliniken SkaS Skövde

Anna Laurén, Undersköterska, Dialysmottagningen SkaS Skövde

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** VE Kard Inf Hud Njur Gastro

**Innehållsansvar:** Ida Pontén, (idapo1), Enhetschef

**Granskad av:** Baran Mardoukhi, (barma17), Apotekare, Anna  
Wärme, (annwa49), Processchef

**Godkänd av:** Christoffer Larsson, (chrla26), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SKAS9715-1834850575-103

**Version:** 6.0

**Giltig från:** 2025-09-19

**Giltig till:** 2027-09-16