

Gäller för: VE Kard Inf Hud Njur Gastro

Innehållsansvar: Ida Pontén, (idapo1), Enhetschef

Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad

Godkänd av: Christoffer Larsson, (chrla26), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-09-15

Giltig till: 2027-09-12

# Desinfektion av dialysmaskin – njursjukvård

## Revideringar i denna version

Borttagande av Fresenius 5008 samt ändring i arbetsgrupp.

## Syfte

GMP-dokument (Good Manufacturing Practice).

Tydliggöra när och hur kemisk desinfektion av dialysmaskiner sker och vilket desinfektionsmedel som används vid Dialysmottagning på Skaraborgs Sjukhus Skövde, (SkaS Skövde).

## Arbetsbeskrivning

Dialysmaskinerna är förprogrammerade för kemisk desinfektion med Citrosteril, som sker automatiskt varje gång maskinen körs i hetdesinfektion. Kontroll av desinfektionsrester behövs inte innan ny patient ansluts till maskinen. Om det passerar mer än 72 timmar mellan det att dialysmaskinen gått i hetdesinfektion visas det ett uppmärksamhetslarm och maskinen tas ur drift. Innan dialysmaskinen åter får tas i drift ska mikrobiologiska prover vara tagna och svaren på dessa ska vara signerade av provtagningsansvarig eller medicinskt ansvarig för tillverkning. Dialysmaskiner som är uppställda i teknikrummet ska dagligen gå i hetdesinfektion samt dokumenteras i loggbok.

På samtliga inkopplade dialysmaskiner körs integrerad värmerengöring, detta i samband med att vattenanläggningen kör hetdesinfektion nattetid tre gånger i veckan, tisdag, torsdag och söndag från kl. 22:00.

# Arbetsgrupp

## *Innehållsansvarig*

Anna Wärme, Överläkare, Njurmedicinska kliniken, SkaS Skövde

Joost Fokkelman, Medicinteknisk ingenjör, Medicinsk teknik, SkaS Skövde.

Thomas Turemark, Sjuksköterska, Dialysmottagningen, SkaS Skövde

Sofie Löfgren, Sektionsledare, Dialysmottagningen, SkaS Skövde

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** VE Kard Inf Hud Njur Gastro

**Innehållsansvar:** Ida Pontén, (idapo1), Enhetschef

**Granskad av:** Baran Mardoukhi, (barma17), Apotekare, Anna Wärme, (annwa49), Processchef

**Godkänd av:** Christoffer Larsson, (chrla26), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SKAS9715-1834850575-29

**Version:** 6.0

**Giltig från:** 2025-09-15

**Giltig till:** 2027-09-12