

Gäller för: VE Kard Inf Hud Njur Gastro

Giltig från: 2025-05-16

Innehållsansvar: Ida Pontén, (idapo1), Enhetschef

Giltig till: 2027-05-08

Granskad av: Anna Wärme, (annwa49), Processchef

Godkänd av: Andreas Lestander Melin, (andle15), Verksamhetschef

Dialysstart inom intensivvård - njursjukvård

Revideringar i denna version

Ändringar i kopplingar och arbetsgrupp.


Syfte

Beskriva rutin vid start av dialys på intensivvårdsavdelning (IVA).

Arbetsbeskrivning

Gör följande innan dialysstart:

1. Vagnen med vattenrenaren (Aqua-UNO) finns i maskinrummet.
Stäng av vattenkran (bild 1) och koppla loss vattenrenaren (snabbkoppling, bild 2).
2. Ta med hela avloppsslangen samt "kroken" (bild 3). Kroken kan man fästa på vagnen.

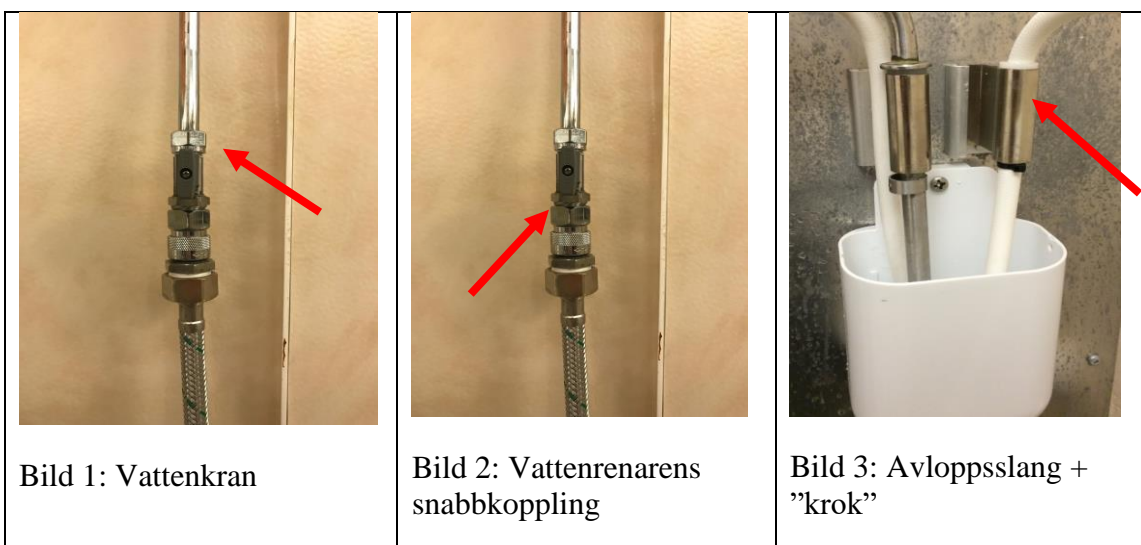

På IVA finns tappställen i samtliga rum.

På IVA kopplar man vattenreningen till tappstället med hjälp av snabbkoppling (bild 2).

3. Var noga med att sprita alla delar och låt dem lufttorka innan de sätts ihop.
4. Koppla ihop dialysmaskinen med Aqua-UNO.
5. Vattenrenarens avloppsslang ska sitta i sin hållare och föras ner i avloppet. Dialysapparatusens slang till avlopp skall sitta bredvid (bild 5).



Bild 5: Placering av avloppsslangar



Bild 6: Ledningsförmågan skall inte överstiga 15 mikro-S

6. Sätt på vattenkranen och starta vattenrenaren.
7. Kontrollera konduktiviteten (ledningsförmåga) på vattenrenaren (bild 6). Konduktivitet skall inte överstiga 15 mikro-S.
8. Sätt på dialysmaskinen och prima på sedvanligt sätt, och starta dialysbehandlingen.

Gör följande efter dialysbehandlingen:

9. Maskinen skall köras i hetdesinfektion. OBS! Om maskinen ska stå kvar på IVA över natten, glöm inte att ta bort integrerad värme i programmet.
10. För att undvika hårt tryck när man kopplar ifrån slangen med inkommande vatten efter dialys, så kan man avlufta genom att skruva på någon av skruvarna på filterbehållaren (bild 7).



Bild 7: Avluftning av förfilter

11. Aqua-Uno:

- Elkontakten ska **ALLTID** sitta i vägguttaget.
- Anslut **ALLTID** vattenslangen till vattenkopplingen och vattenslingan, vrid på vattnet.
- Placera avloppsslangen till avloppet.

Arbetsgrupp

Innehållsansvarig

Anna Wärme, Överläkare, Njurmedicinska kliniken, SkaS Skövde

Sofie Löfgren, Sektionsledare, Dialysmottagningen, SkaS Skövde

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Kard Inf Hud Njur Gastro

Innehållsansvar: Ida Pontén, (idapo1), Enhetschef

Granskad av: Anna Wärme, (annwa49), Processchef

Godkänd av: Andreas Lestander Melin, (andle15),
Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9715-1834850575-35

Version: 8.0

Giltig från: 2025-05-16

Giltig till: 2027-05-08