

Gäller för: VE Barn o Kvinna

Giltig från: 2025-11-04

Innehållsansvar: Jenny Bratt, (jenbr22), Specialistundersköterska

Giltig till: 2027-11-30

Granskad av: Emelie Ottosson, (emery1), Processchef

Godkänd av: Marie Hufvudsson, (marjo100), Verksamhetschef

HemoCue 201+, obstetrik - handläggning

Revideringar i denna version

Förlängd giltighetstid.

Bakgrund, syfte och mål

Rutin för mätning av p-glukos på barn och vuxna.

Arbetsbeskrivning

Användningsområde

Vid mätning av p-glukos på barn och vuxen på BB. För indikationer se styrdokument [Diabetes matris – barn](#) och [Prematura barn, tillväxthämmande barn – förlossningsvård, BB-vård](#).

Behörighet

Behörig personal förtrogen med apparaten och p-glukosmätning.
Personlig kod behövs.

Förvaring och material

Apparaten finns på barnundersökningsrummet på BB samt förlossningens PH-rum, likaså kyvetter och stickmaterial. Tillbehör beställs av beställningsansvarig. Rengöringsutrustning finns vid apparaten.

Bruksanvisning

Bruksanvisning finns i pärm intill apparaten.

Skötsel och underhåll

- Funktionskontroll med kontrollösning 1 gång per vecka. Kontrollerna ska skötas av den ansvariga genom Ordning och reda. Apparaten tvättas av dagligen med mild tvållösning eller sprit.
- Veckorengöring enligt Ordning och reda.
- Extern kontroll tio gånger per år Ekväls (Nationell kontroll). Kontrollösningen analyseras direkt och sköts av ansvarig barnsköterska Else-Marie Torell, neo. Testet görs som ett enkelprov och skrivs ner på bifogat protokoll.

Arbetsgrupp

Jenny Bratt och Pernilla Engström.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Barn o Kvinna

Innehållsansvar: Jenny Bratt, (jenbr22),
Specialistundersköterska

Granskad av: Emelie Ottosson, (emery1), Processchef

Godkänd av: Marie Hufvudsson, (marjo100), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9716-1940753776-154

Version: 7.0

Giltig från: 2025-11-04

Giltig till: 2027-11-30