

Gäller för: VE Barn o Kvinna

Giltig från: 2024-11-13

Innehållsansvar: Elisabeth Skatt, (elisk1), Undersköterska

Giltig till: 2026-11-30

Granskad av: Emelie Ottosson, (emery1), Processchef

Godkänd av: Marie Hufvudsson, (marjo100), Verksamhetschef

Sterilgods, förvaring och hantering – BB-vård

Revideringar i denna version

Förlängd giltighetstid.

Bakgrund, syfte och mål

Rutin för hur sterilt gods hanteras och förvaras på BB.

Arbetsbeskrivning

Förvaring

Alla sterila instrument finns i Undersökningsrum kvinna.

Hantering

Allt sterilgods är förpackat med utgångsdatum och med kodlapp utanpå.

Sterilgods är uppdelat i styckförpackning.

Den som öppnar sterilt instrument ansvarar för att tillhörande kodlapp klistras upp på särskild lista i sköljen.

Sterilt gods

Lämnas av vaktmästare i miljörummet, särskild hylla och plockas in enligt ordning och reda.

Orent sterilt gods

- Rengörs och förvaras i sköljen.
- Sköljs av efter användning.
- Körs i diskmaskinen och läggs därefter i avsedd korg på diskbänken.

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

- Varje dag räknas rena instrument efter kodlappar som finns på lista och förpackas därefter tillsammans med kodlappar i plastpåse enligt ordning och reda.
- Ställs i miljörummet, särskild hylla, hämtas av vaktmästare.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Barn o Kvinna

Innehållsansvar: Elisabeth Skatt, (elisk1), Undersköterska

Granskad av: Emelie Ottosson, (emery1), Processchef

Godkänd av: Marie Hufvudsson, (marjo100), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9716-1940753776-262

Version: 5.0

Giltig från: 2024-11-13

Giltig till: 2026-11-30