

Gäller för: VE Barn o Kvinna

Giltig från: 2026-01-08

Innehållsansvar: Susanne Klang, (suskl), Undersköterska

Giltig till: 2028-01-31

Granskad av: Emelie Ottosson, (emery1), Enhetschef

Godkänd av: Marie Hufvudsson, (marjo100), Verksamhetschef

# Urinalanalys (Clinitek Status +) - förlossningsvård

## Revideringar i denna version

Revidering markerad med gult.

## Bakgrund, syfte och mål

Att på ett säkert och enhetligt sätt analysera urinstickor.

## Arbetsbeskrivning

## Förvaring och material

Apparat och stickor finns i sköljrum på förlossningen (finns även en apparat på specialistmödrahälsovården).

## Analys

Kortfattad användarmanual finns vid apparaten. Manual från tillverkaren sitter i pärm i apparatrummet på BB.

## Skötsel

### En gång/vecka av tilldelad

Rengör testsläden (den stora) med vatten. Håll den så att den vita kalibreringsstickan inte kommer i kontakt med väta. Torka noga så det blir helt torrt. Kontrollera att kalibreringsstickan inte är skadad eller missfärgad (ska vara blank och vit). Om den är smutsig rengörs denna *försiktigt* med en tops med vatten på, lufttorka.

Använd den kemiska urinen som står i smutssköljens kylskåp. Följ instruktionerna.

### **Efter varje analys**

Rengör slädesinsatsen med sprit. Viktigt att den vita kalibreringsrutan på kortsidan inte kommer i kontakt med sprit. Om detta ändå händer – skölj med vatten. Den blir förstörd i för tid, inspektera!

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** VE Barn o Kvinna

**Innehållsansvar:** Susanne Klang, (suskl), Undersköterska

**Granskad av:** Emelie Ottosson, (emery1), Enhetschef

**Godkänd av:** Marie Hufvudsson, (marjo100), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SKAS9716-1940753776-286

**Version:** 9.0

**Giltig från:** 2026-01-08

**Giltig till:** 2028-01-31