

Gäller för: VE Barn o Kvinna

Giltig från: 2025-03-11

Innehållsansvar: Jenny Bratt, (jenbr22), Specialistundersköterska

Giltig till: 2027-03-31

Granskad av: Emelie Ottosson, (emery1), Processchef

Godkänd av: Marie Hufvudsson, (marjo100), Verksamhetschef

# Vattenmadrass vid ljusbehandling och låg temperatur hos nyfödda – BB

## Revideringar i denna version

Revidering markerad med gult.

## Bakgrund, syfte och mål

### Syfte

Att ha tillgång till värme vid ljusbehandling och vid låg uppmätt temperatur hos barnet.

### Mål

- Att ett barns temperatur hålls på en normal nivå vid ljusbehandling (36,5–37,5 grader).
- Att kunna höja temperaturen hos barn med låg temperatur.

## Arbetsbeskrivning

### Förvaring

Vattenmadrass finns i MTA-rummet och i barnsängsförrådet på förlossningen.

### Hantering

Vattenmadrassen ska **alltid** vara uppvärmd. Vid ändring av temperatur, se kontrollenheten som hänger på sängen. OBS! Ändring av temperatur på vattenmadrassen kräver barnläkarordination. Grön duk på madrassen när den inte används.

## Rengöring

- Torka med sprit.
- Byt vatten en gång per år, tillsätt fem tabletter. Viktigt att anteckna datum när vattnet är bytt. Tabletterna finns på hyllan i MTA-rummet.
- Madrasskyddet tvättas vid behov i 60 grader. Hängs för torkning.
- Madrassen byts ut efter behov. Fem tabletter vid ny madrass, fem tabletter vid påfyllning.
- **Vattenmadrass och** Kanmed vattentabletter beställs av inköpsansvariga på BB alternativt förlossningen.

## Bruksanvisning

Vattenmadrass placeras i barnsäng ovanpå befintlig madrass. Fäst kontrollenhet vid fotände av barnsäng. Ta bort grön duk. Dra på ett blått babynest över själva vattenmadrassen.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** VE Barn o Kvinna

**Innehållsansvar:** Jenny Bratt, (jenbr22),  
Specialistundersköterska

**Granskad av:** Emelie Ottosson, (emery1), Processchef

**Godkänd av:** Marie Hufvudsson, (marjo100), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SKAS9716-1940753776-299

**Version:** 6.0

**Giltig från:** 2025-03-11

**Giltig till:** 2027-03-31