

SWAN-Switch Blodprovstagningsystem, standard

Blodprovstagning

Innan blodprovstagning kontrollera kärlaccess.

Observera att patienten är till höger om provporten på bilderna.



1. Under pågående kontinuerlig tryckmätning är SWAN-Switch kranen stängd mot provtagningsporten.




2. Innan provtagning desinficera det nålfria membranet med avsett desinfektionsmedel. Låt lufttorka!



3. Innan aspiration vrid SWAN-Switch kranen 180° enligt bild.



4. Aspirera upp färskt blod genom att skruva reservoaren motsols till det tar stopp. Vrid inte för fort och ha hela tiden kontroll på patientens infartskanyl/kateter så att normalt backflöde erhålls.

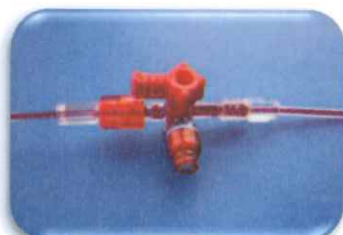


5. Stäng därefter SWAN-Switch kranens OFF-vinge i riktning mot reservoar och tryckgivare. Detta förhindrar att utspätt blod sedan kan aspireras i nästa steg.




6. Anslut önskad blodprovstagningsutrustning genom att aktivera det nålfria membranet på SWAN-Switch kranens sidoport - aspirera den volym blod som önskas.



7. Vrid SWAN-Switch kranens OFF-vinge i riktning mot det nålfria membranet. Avlägsna därefter sprutan. Spritavtorka membranet igen. Lufttorka! Låt SWAN-Switchkranen förbli stängd en kort stund till.

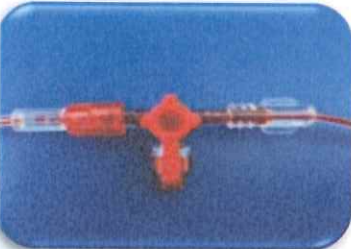

8. När blodprovstagningen är utförd låt SWAN-Switch kranen vara stängd. Skruva därefter långsamt tillbaka reservoaren till sitt ursprungliga bottenläge.

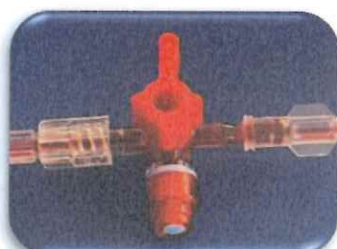

9. Öppna provtagningsporten med OFF-vingen enligt bild. Flush sedan ordentligt systemet med hjälp av flushvingarna på tryckgivaren. Rengör porten noggrant!



10. Stäng SWAN-Switch kranen med OFF-vinge i dess ursprungliga läge - mot kranens provtagningsport.



11. Kontrollera att tryckmätningsskurvan återfår sitt normala utseende - vid behov flusha.