


Bilder för upplägg i Beachchair

Bild 1.



Bild 2.

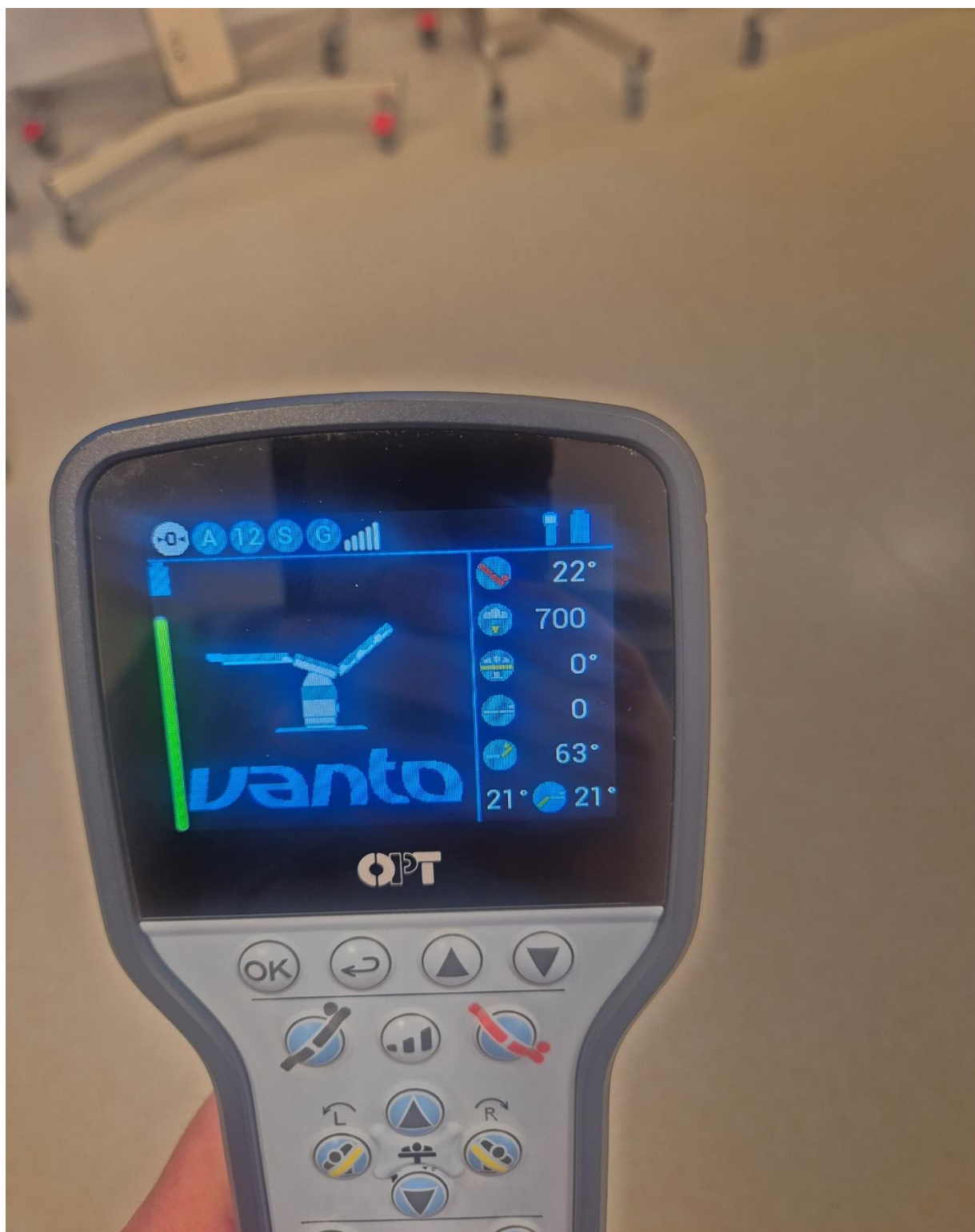


Detta är en ungefärlig inställning. Det ska anpassas efter patienten.

Bild 3.



Så här ska det se ut.

Bild 4.

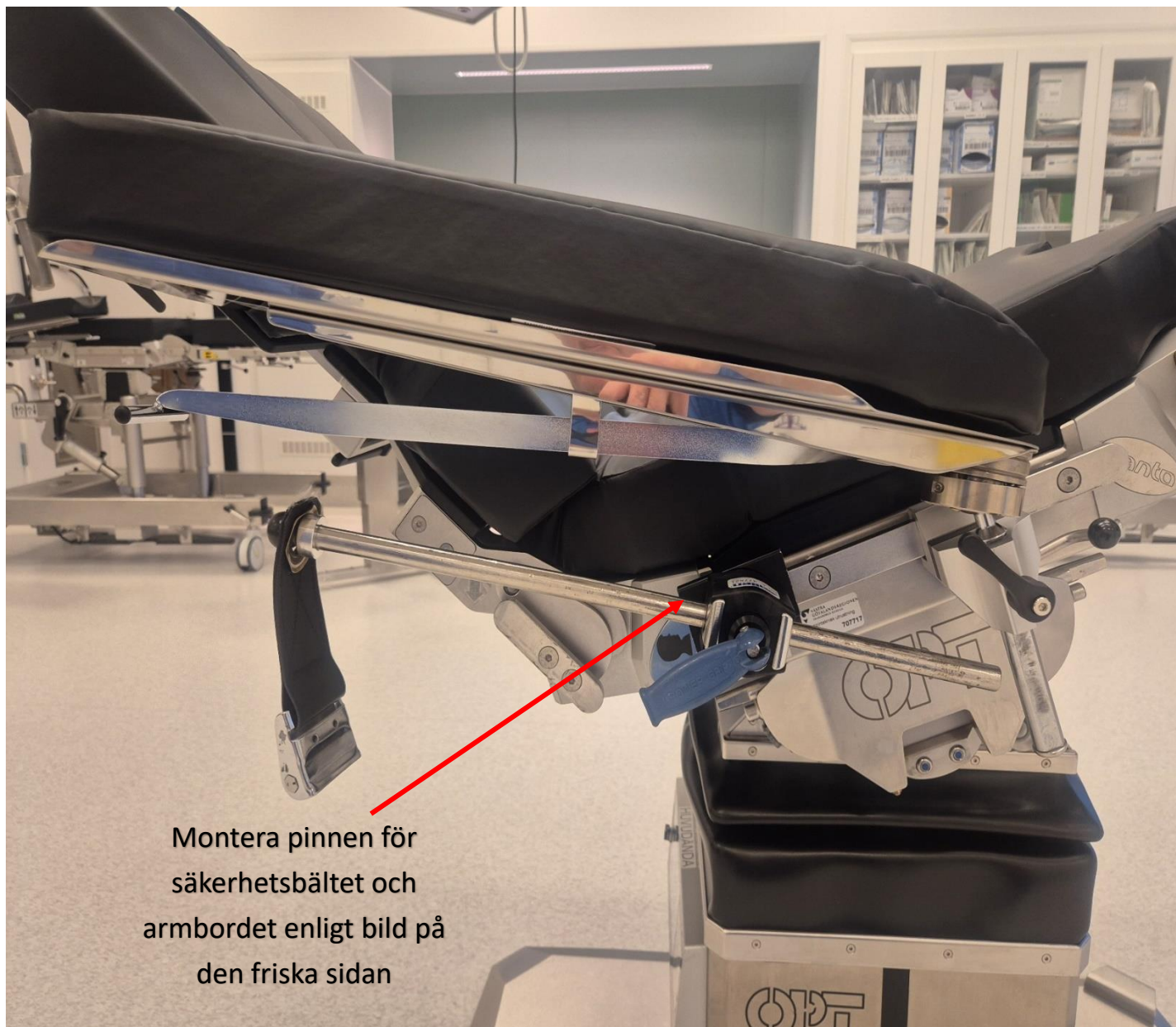

Montera pinnen för
säkerhetsbältet och
armbordet enligt bild på
den friska sidan

Bild 5.



Så här ska det se ut.

Bild 6.


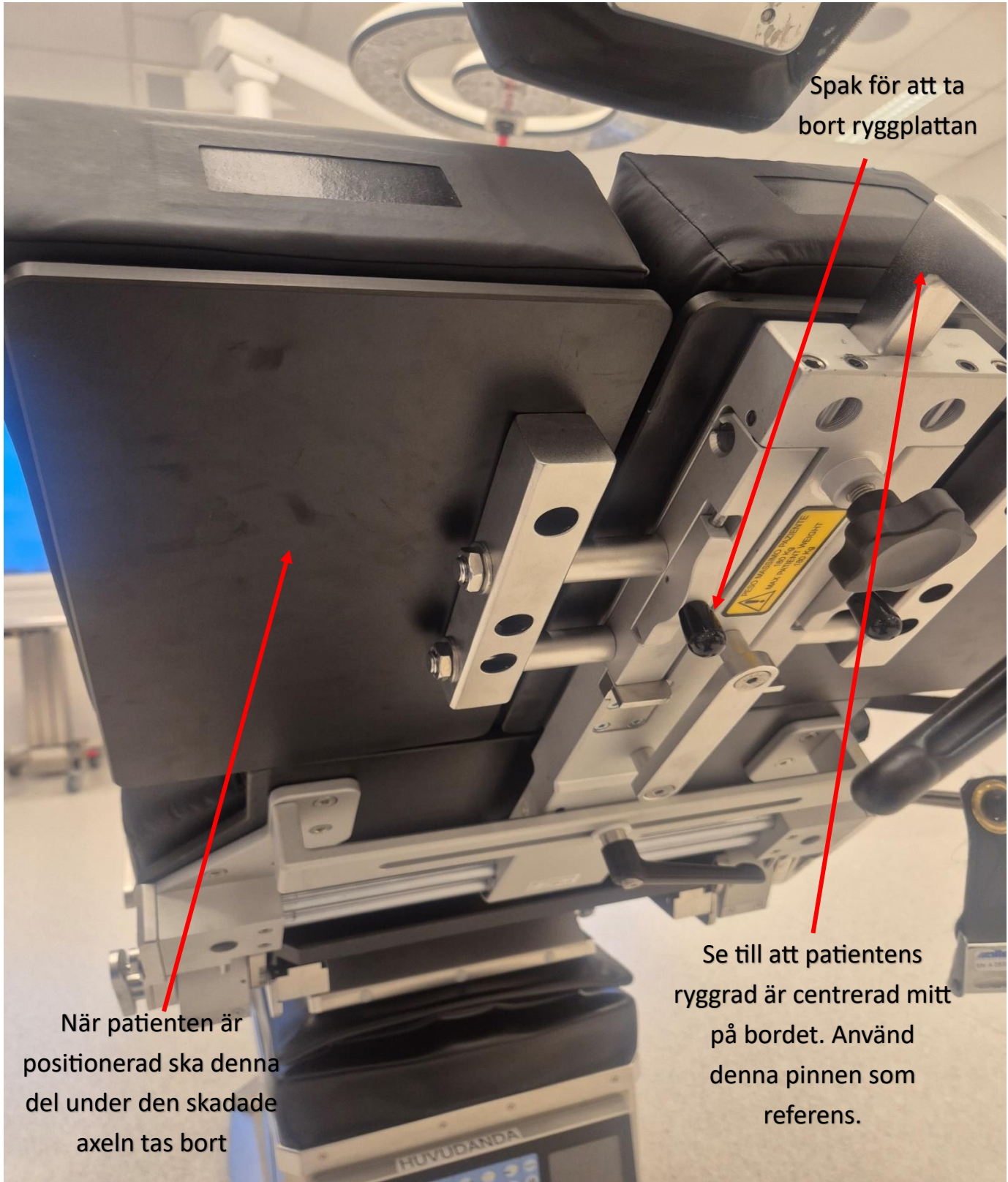


Bild 7.



Bild 8.

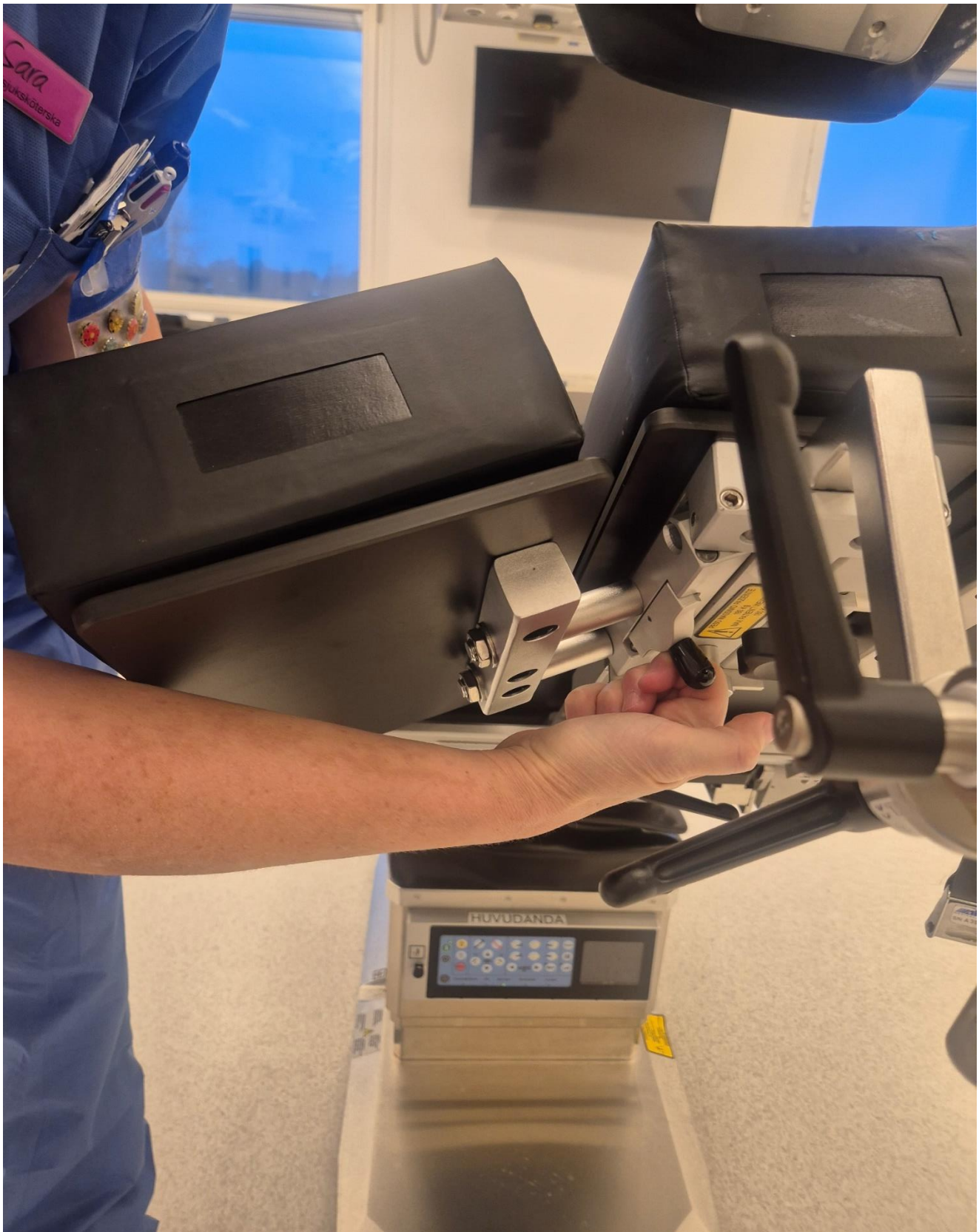

Skjut spaken uppåt och vik ner ryggplattan och ta bort den.


Bild 9.



Säkerhetsbältet
sätts fast på skenan
som sitter i mitten

Bild 10.

Öppna ratten för att justera patientens huvud. OBS! Alla leder öppnas när man säkrar patientens huvud och tub!

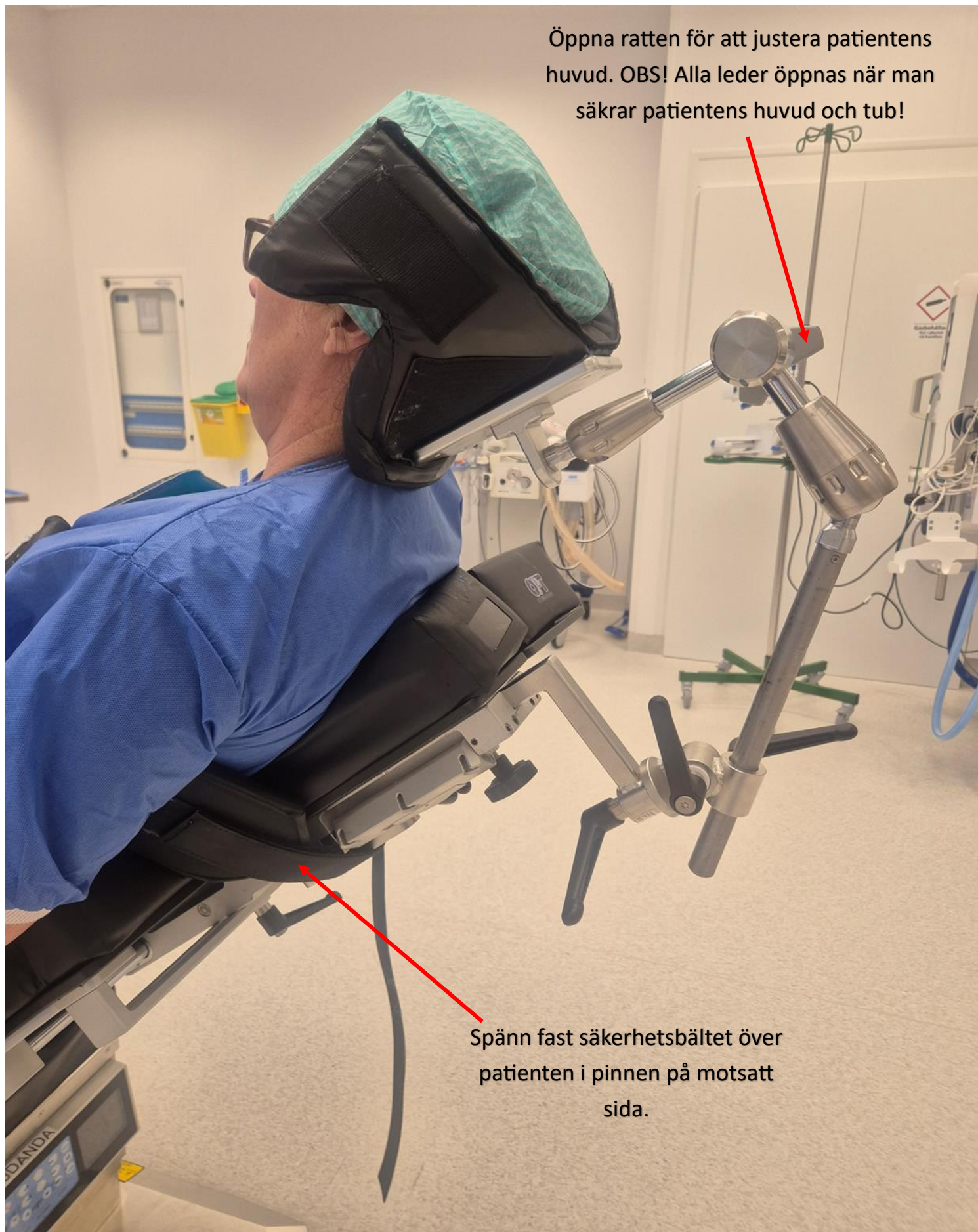

Spänn fast säkerhetsbältet över patienten i pinnen på motsatt sida.

Bild 11.



Fixera huvudet med hak- och pannband. Polstra under säkerhetsbältet med t.ex. geldyna.

Bild 12.

På bild 12, 13 och 14 ser man olika varianter av armbord för den arm som ska opereras. Hör med operatör vad som önskas.

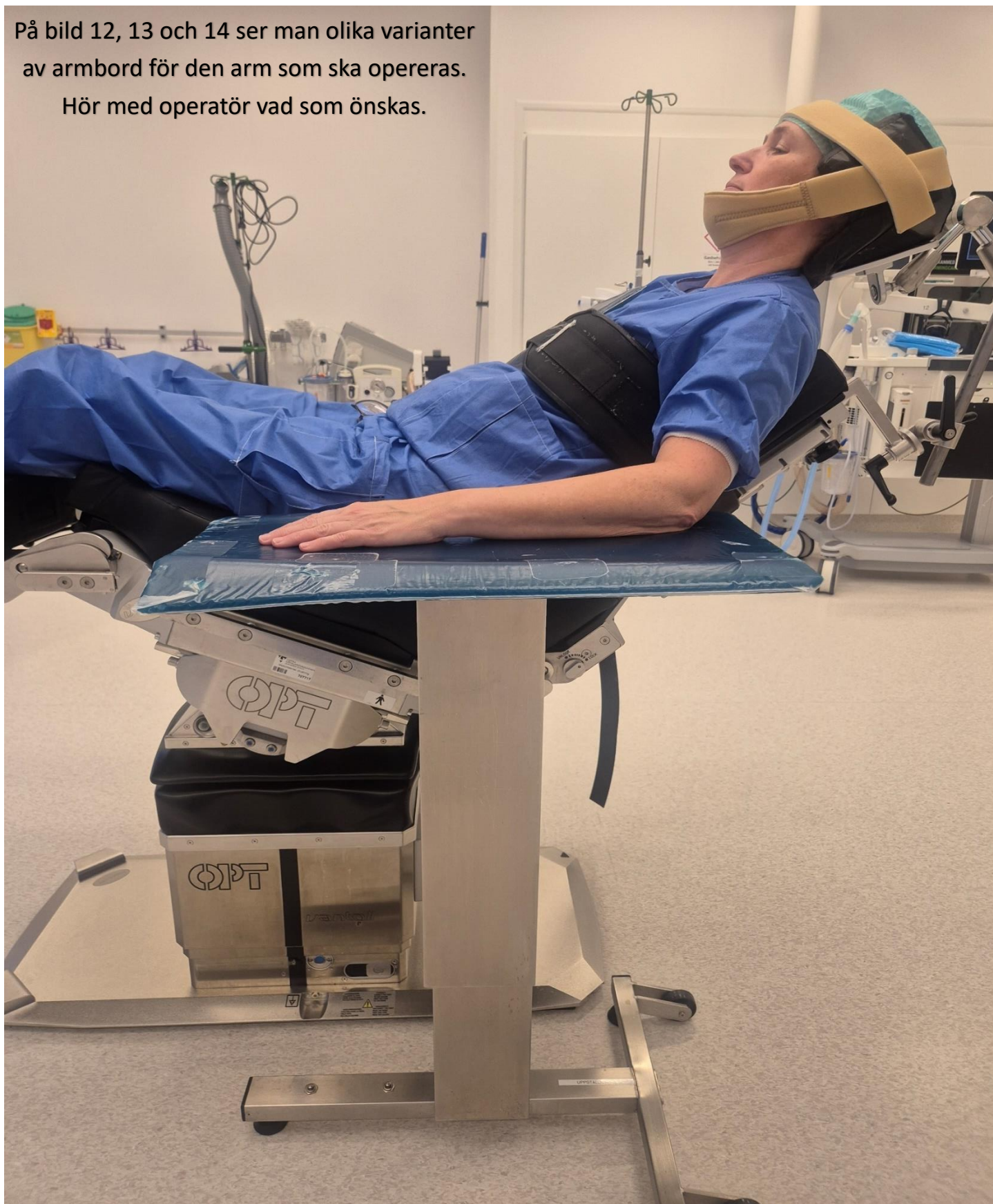


Bild 13.



Bild 14.



Bild 15.



Säkra patienten med
benrem.