

Rekommenderade kombinationer av vårdarmanövrerat drivaggregat och manuell rullstol i standardutförande

Uppdaterades 2023-05-11

Här presenteras kombinationer av rullstolar i standardutförande och drivaggregat som HMC VGR rekommenderar gällande funktion och användarvänlighet. Dessa kombinationer av drivaggregat och nybeställd rullstol kan beställas av förskrivare genom att registrera en arbetsorder för montering. Om utprovningshjälp eller annan kombination/utförande önskas registrera en arbetsorder för konsultation. Samtliga drivaggregat är komponenthanterade!

OBS: När rullstol och drivaggregat ska monteras ihop innan leverans är det extra viktigt att beställningen görs på samma order, samleverans bockas i samt att aktivitet/arbetsorder kopplas till drivaggregatet - då följs både rullstol och drivaggregat åt i systemet och inget löper risk att levereras ut var för sig

Följande kombinationer rekommenderas.

Läs mer om kombinationerna och hitta artikelnummer nedan!

1. E-Walk monterad på Transit III
2. V25 monterad på Transit III
3. E-Walk monterad på Cross 5 med eller utan vårdarbroms
4. V25 monterad på Cross 5
5. E-Walk monterad på HD Balance 16" och 24"
6. V25 monterad på Azalea, Azalea Assist, Azalea Tall
7. E-Walk monterad på Cross 6
8. V25 monterad på Cross 6

1. E-Walk monterad på Transit III

www.decon.se
www.etac.se

OBS: Är komponenthanterad

Beskrivning:

Påskjutningsaggregatet kan tas av och på från rullstolen

När påskjutningsaggregatet tagits av, kan rullstolen fällas ihop som vanligt

Stolens original tipskydd behöver inte tas bort

Körsträcka ca 16 km

Brukarvikt max 135 kg för Transit III (150 kg för Ewalk)

Backtagningsförmåga max 6 grader

Vikt ca 15 kg exkl batteri och rullstol

Fungerar bäst att köra på hårda underlag, såsom asfalt

E-walk kan monteras på Transit III i standardutförande, sittbredd 40-60 cm (för standardutförande se www.vgregion.se/hmc)

Vänster sidostyck E-walk stolsbredd 38-45 (följer alltid med vid beställning om inte annat anges). Önskas bredare stol se sesam nr nedan.

Höger sidostycke E-walk stolsbredd 38-45 (följer alltid med vid beställning om inte annat anges). Önskas bredare stol se sesam nr nedan.

Beställningsinstruktion/kundorder

Beställ följande artiklar som komponenter till E-walk samt ny beställning av Transit rullstol med samleverans och registrera en arbetsorder för montering enligt anvisning. **Använd rutinen: Att knyta ihop beställning av hjälpmedel med arbetsorder om montering/installation se länk nedan.** Ange på arbetsordern om manöverpanelen för E-walk skall monteras på höger eller vänster sida.

Rullstol beställs enligt standardutförande (för standardutförande se www.vgregion.se/hmc)



[Att knyta ihop beställning av hjälpmedel med arbetsorder om montering/installation](#)

Sesam nr	
59332	Drivaggregat E-walk vårdarstyrt inkl Lipo batteri och laddare
50774	Monteringsats E-walk till Transit III [□]
53103	Vänster sidostycke stolsbredd 45-53
53101	Höger sidostycke stolsbredd 45-53
56015	Vänster sidostycke stolsbredd 53-60
56014	Höger sidostycke stolsbredd 53-60

2. V25 monterad på Transit III

www.invacare.se
www.etac.se

OBS: Är komponenthanterad

Beskrivning:

Påskjutningsaggregatet kan tas av och på från rullstolen

När påskjutningsaggregatet tagits av, kan rullstolen fällas ihop som vanligt

Stolens original tippskydd behöver monteras bort. Särskilda tippskydd skall beställas och sättas på om motorn tas bort

Körsträcka ca 25 km

Brukarvikt max 160 kg

Backtagningsförmåga max 10,2 grader

Vikt ca 23 kg exkl rullstol

Fungerar bäst att köra på hårda underlag, såsom asfalt

V25 kan monteras på Transit III i standardutförande, sittbredd 40-50 cm (för standardutförande se www.vgregion.se/hmc)



Beställningsinstruktion/Kundorder

Beställ följande artiklar som komponenter till V25 samt ny beställning av Transit rullstol med samleverans och registrera en arbetsorder för montering enligt anvisning. **Använd rutinen: Att knyta ihop beställning av hjälpmedel med arbetsorder om montering/installation se länk nedan.** Ange på arbetsordern om manöverpanelen för V25 skall monteras på höger eller vänster sida.

Rullstol enligt standardutförande (för standardutförande se www.vgregion.se/hmc)

[Att knyta ihop beställning av hjälpmedel med arbetsorder om montering/installation](#)

Sesam nr	
78574	Drivaggregat Viamobil V25 std inkl körhandtag, tippskydd, batteri och laddare samt bulthållare fram och bak (rakt) med nytt fäste för körhandtag o tippskydd 160 kg
59100	Monteringsatts V25 till Transit
36718	Tippskydd V25 Höjdstb kpl (används då V25 är bortkopplad) till Transit, och XLT
37698	Tippskydd V25 överdel 15 mm till Transit (beställes x 2) Används bara med 36718

3. E-Walk monterad på Cross 5, med eller utan vårdarbroms

OBS: Är komponenthanterad

OBS: Drivaggregat monteras inte på Cross 1 sedan 200826

Beskrivning:

Påskjutningsaggregatet kan tas av och på från rullstolen

När påskjutningsaggregatet tagits av, kan rullstolen fällas ihop som vanligt

Stolens original tippskydd behöver inte tas bort

Körsträcka ca 16 km

Brukarvikt max 135 kg för Cross 5 (150 kg för Ewalk)

Backtagningsförmåga max 6 grader

Vikt ca 15 kg exkl batteri och rullstol

Fungerar bäst att köra på hårda underlag, såsom asfalt

E-walk kan monteras på Cross 5 i standardutförande, sittbredd 40-60 cm (för standardutförande se www.vgregion.se/hmc)

Utöver rullstolens standardutförande rekommenderas val av 8" länkhjul med förstärkta framgafflar, för bättre framkomlighet ute

Vänster sidostycke E-walk stolsbredd 38-45 (följer alltid med vid beställning om inte annat anges). Önskas bredare stol se sesam nr nedan.

Höger sidostycke E-walk stolsbredd 38-45 (följer alltid med vid beställning om inte annat anges). Önskas bredare stol se sesam nr nedan.

Beställningsinstruktion/Kundorder

Beställ följande artiklar som komponenter till E-walk samt ny beställning av Cross 5 rullstol, länkhjul och framgaffel med samleverans och registrera en arbetsorder för montering enligt anvisning. Välj hö och vänster sidostycke efter bredd på rullstol. Använd rutinen: Att knyta ihop beställning av hjälpmedel med arbetsorder om montering/installation se länk nedan. Ange på arbetsordern om manöverpanelen för E-Walk skall monteras på höger eller vänster körhandtag

Rullstol enligt standardutförande (för standardutförande se www.vgregion.se/hmc)

Koppla arbetsorder för montering till kundordern. Ange på arbetsordern om manöverpanelen för E-Walk skall monteras på höger eller vänster körhandtag



[Att knyta ihop beställning av hjälpmedel med arbetsorder om montering/installation](#)

Sesam nr	
59332	Drivaggregat E-walk vårdarstyrt inkl Lipo batteri och laddare brukarvikt 150kg.
59337	Monteringssats till Cross5
53103	Vänster sidostycke stolsbredd 45-53
53101	Höger sidostycke stolsbredd 45-53
56015	Vänster sidostycke stolsbredd 53-60
56014	Höger sidostycke stolsbredd 53-60
Nedanstående beställs med samleverans ihop med c ross 5 och E-walk	
35873	Länkhjul 8tum 200x50mm massivt mjuk rund bana Cross Cross XL Transit
63992	Framgaffel Transit 8x2tum stålaxel m hål för skydd hjulaxel. <i>Beställes x 2</i>

4.V25 monterad på Cross 5

OBS: Är komponenthanterad

OBS: Drivaggregat monteras inte på Cross 1 sedan 200826

Beskrivning:

Påskjutningsaggregatet kan tas av och på från rullstolen

När påskjutningsaggregatet tagits av, kan rullstolen fällas ihop som vanligt

Körsträcka ca 25 km

Brukarvikt max 135 kg

Backtagningsförmåga max 10,2 grader

Vikt ca 23 kg exkl rullstol

Fungerar bäst att köra på hårda underlag, såsom asfalt

V25 kan monteras på Cross 5 i standardutförande, sittbredd 40-50 cm (för standardutförande se www.vgregion.se/hmc). Går ej att montera om sitthöjd på rullstol i bakkant är 40 cm eller lägre.

Utöver rullstolens standardutförande rekommenderas val av 8" länkhjul med förstärkta framgafflar, för bättre framkomlighet ute



Beställningsinstruktion/Kundorder

Beställ följande artiklar som komponenter till V25 samt ny beställning av Cross 5 rullstol, länkhjul och framgaffel med samleverans och registrera en arbetsorder för montering enligt anvisning. Använd rutinen:

Att knyta ihop beställning av hjälpmedel med arbetsorder om montering/installation se länk nedan. Ange på arbetsordern om manöverpanelen för V25 skall monteras på höger eller vänster sida.

Rullstol enligt standardutförande (för standardutförande se www.vgregion.se/hmc)

Monteras hjulaxeln i främsta eller mittersta läget medför det allt för stor tipprisk. Rekommenderas ej.

[Att knyta ihop beställning av hjälpmedel med arbetsorder om montering/installation](#)

Sesam nr	
78574	Drivaggregat Viamobil V25 std inkl körhandtag, tippskydd, batteri och laddare samt bulthållare fram och bak (rakt) med nytt fäste för körhandtag o tippskydd 160 kg
59897	Monteringssats till Cross 5
<i>Nedanstående beställs med samleverans ihop med c ross 5</i>	
35873	Länkhjul 8tum 200x50mm massivt mjukt rund bana Cross Cross XL Transit. Beställes x 2
63992	Framgaffel Transit 8x2tum stålaxel m hål för skydd hjulaxel. <i>Beställes x 2</i>
75284	Adapterhylsa Viamobil Etac Cross 5 (adaperhylsa behövs i bakersta raden mittersta höjdläget (C/D 5/6) Detta läge kan ej kombineras med vårdarbroms).

5. E-Walk monterad på HD Balance 16" och 24"

OBS: Är komponenthanterad

Beskrivning:

Påskjutningsaggregatet kan tas av och på från rullstolen

Tiltmöjligheter påverkas inte

Stolens original tipskydd behöver inte tas bort

Körsträcka ca 22 km

Brukarvikt max 135 kg för HD Balance (150 kg för Ewalk)

Backtagningsförmåga max 6 grader

Vikt ca 15 kg exkl batteri och rullstol

Fungerar bäst att köra på hårda underlag, såsom asfalt

E-walk kan monteras på HD Balance i standardutförande, sittbredd 38-50 cm (för standardutförande se www.vgregion.se/hmc)

Vänster sidostyck E-walk stolsbredd 38-45 (följer alltid med vid beställning om inte annat anges). Önskas bredare stol se sesam nr nedan.

Höger sidostycke E-walk stolsbredd 38-45 (följer alltid med vid beställning om inte annat anges). Önskas bredare stol se sesam nr nedan.



Beställningsinstruktion/Kundorder

Beställ följande artiklar som komponenter till E-walk samt ny beställning av HD Balance rullstol med samleverans och registrera en arbetsorder för montering enligt anvisning. Välj hö och vä sidostycke efter bredd på rullstol. **Använd rutinen: Att knyta ihop beställning av hjälpmedel med arbetsorder om montering/installation se länk nedan.** Ange på arbetsordern om manöverpanelen för E-Walk skall monteras på höger eller vänster körhandtag

Rullstol enligt standardutförande (för standardutförande se www.vgregion.se/hmc)

OBS: Enligt HD Rehab bör drivaggregat monteras på ny HD Balance rullstol.

[Att knyta ihop beställning av hjälpmedel med arbetsorder om montering/installation](#)

59332	Drivaggregat E-walk vårdarstyrt inkl Lipo batteri och laddare brukarvikt
69585	Monteringsatts E-walk till HD Balance 16" / 24", justerbart stag ingår.
53103	Vänster sidostycke stolsbredd 45-53
53101	Höger sidostycke stolsbredd 45-53

6. V25 monterad på Azalea

OBS: Är komponenthanterad

Uppdaterades 2021-12-02

Beskrivning:

Påskjutningsaggregatet kan tas av och på från rullstolen

Stolens original tipskydd behöver inte monteras bort .

Tiltfunktion påverkas inte

Körsträcka ca 20 km

Brukarvikt max 135 kg för Azalea (160 kg för V25)

Backtagningsförmåga max 10,2 grader

Vikt ca 13,5 kg exkl rullstol

Fungerar bäst att köra på hårda underlag, såsom asfalt

V25 kan monteras på Azalea i standardutförande med separata körhandtag, sittbredd 39-50 cm (för standardutförande se www.vgregion.se/hmc)



Beställningsinstruktion/Kundorder

Beställ följande artiklar som komponenter till V25 samt ny beställning av Azalea rullstol med samleverans och registrera en arbetsorder för montering enligt anvisning. **Använd rutinen: Att knyta ihop beställning av hjälpmedel med arbetsorder om montering/installation se länk nedan.** Ange på arbetsordern om manöverpanelen för V25 skall monteras på höger eller vänster sida.

Rullstol enligt standardutförande (för standardutförande se www.vgregion.se/hmc)

[Att knyta ihop beställning av hjälpmedel med arbetsorder om montering/installation](#)

Sesam nr	
55881	Drivaggregat V25 std vårdarstyrt inkl körhandtag, tipskydd och batteri o laddare brukarvikt 160kg.
78574	Drivaggregat Viamobil V25 std inkl körhandtag, tipskydd, batteri och laddare samt bulthållare fram och bak (rakt) med nytt fäste för körhandtag o tipskydd 160 kg
68718	Monteringsbracket Azalea 2016
53104	Fäste för körhandtag V25 till HD, HD Humlan och Azalea. Beställes x 2.
52602	Fäste för körhandtag V25 expander S till HD, HD Humlan HD Balance och Azalea. Beställes x 2

7. E-Walk monterad på Cross 6, med eller utan vårdarbroms

OBS: Är komponenthanterad

Beskrivning:

Påskjutningsaggregatet kan tas av och på från rullstolen

När påskjutningsaggregatet tagits av, kan rullstolen fällas ihop som vanligt

Stolens original tipskydd behöver inte tas bort

Körsträcka ca 16 km

Brukarvikt max 135 kg för Cross 5 (150 kg för Ewalk)

Backtagningsförmåga max 6 grader

Vikt ca 15 kg exkl batteri och rullstol

Fungerar bäst att köra på hårda underlag, såsom asfalt

E-walk kan monteras på Cross 6 i standardutförande, sittbredd 40-60 cm (för standardutförande se www.vgregion.se/hmc)



Utöver rullstolens standardutförande rekommenderas val av 8" länkhjul med förstärkta framgafflar, för bättre framkomlighet ute
Vänster sidostycke E-walk stolsbredd 38-45 (följer alltid med vid beställning om inte annat anges). Önskas bredare stol se sesam nr nedan.
Höger sidostycke E-walk stolsbredd 38-45 (följer alltid med vid beställning om inte annat anges). Önskas bredare stol se sesam nr nedan.

Beställningsinstruktion/Kundorder

Beställ följande artiklar som komponenter till E-walk samt ny beställning av Cross 5 rullstol, länkhjul och framgaffel med samleverans och registrera en arbetsorder för montering enligt anvisning. Välj hö och vänster sidostycke efter bredd på rullstol. **Använd rutinen: Att knyta ihop beställning av hjälpmedel med arbetsorder om montering/installation se länk nedan.** Ange på arbetsordern om manöverpanelen för E-Walk skall monteras på höger eller vänster körhandtag
Rullstol enligt standardutförande (för standardutförande se www.vgregion.se/hmc)
Koppla arbetsorder för montering till kundordern. Ange på arbetsordern om manöverpanelen för E-Walk skall monteras på höger eller vänster körhandtag

[Att knyta ihop beställning av hjälpmedel med arbetsorder om montering/installation](#)

Sesam nr	
59332	Drivaggregat E-walk vårdarstyrkt inkl Lipo batteri och laddare brukarvikt 150kg.
77472	Monteringsatts till E-walk, Etac Cross 6
53103	Vänster sidostycke stolsbredd 45-53
53101	Höger sidostycke stolsbredd 45-53
56015	Vänster sidostycke stolsbredd 53-60
56014	Höger sidostycke stolsbredd 53-60
<i>Nedanstående beställs med samleverans ihop med cross 5 och E-walk</i>	
35873	Länkhjul 8tum 200x50mm massivt mjuk rund bana Cross Cross XL Transit. Beställes x 2
63992	Framgaffel Transit 8x2tum stålaxel m hål för skydd hjulaxel. Beställes x 2

8.V25 monterad på Cross 6

OBS: Är komponenthanterad

Beskrivning:

Påskjutningsaggregatet kan tas av och på från rullstolen

När påskjutningsaggregatet tagits av, kan rullstolen fällas ihop som vanligt

Körsträcka ca 25 km

Brukarvikt max 160 kg

Backtagningsförmåga max 10,2 grader

Vikt ca 23 kg exkl rullstol

Fungerar bäst att köra på hårda underlag, såsom asfalt

V25 kan monteras på Cross 6 i standardutförande, sittbredd 40-50 cm (för standardutförande se www.vgregion.se/hmc). Går ej att montera om sitthöjd på rullstol i bakkant är 40 cm eller lägre.

Utöver rullstolens standardutförande rekommenderas val av 8" länkhjul med förstärkta framgafflar, för bättre framkomlighet ute

Beställningsinstruktion/Kundorder

Beställ följande artiklar som komponenter till V25 samt ny beställning av Cross 6 rullstol, länkhjul och framgaffel med samleverans och registrera en arbetsorder för montering enligt anvisning. **Använd rutinen: Att knyta ihop beställning av hjälpmedel med arbetsorder om montering/installation se länk nedan.** Ange på arbetsordern om manöverpanelen för V25 skall monteras på höger eller vänster sida.
Rullstol enligt standardutförande (för standardutförande se www.vgregion.se/hmc)

[Att knyta ihop beställning av hjälpmedel med arbetsorder om montering/installation](#)



Sesam nr	
78574	Drivaggregat Viamobil V25 std inkl körhandtag, tippskydd, batteri och laddare samt bulthållare fram och bak (rakt) med nytt fäste för körhandtag o tippskydd 160 kg
77774	Monteringsats V25 till Cross 6
<i>Nedanstående beställs med samleverans ihop med c ross 5</i>	
35873	Länkhjul 8tum 200x50mm massivt mjuk rund bana Cross Cross XL Transit. Beställes x 2
63992	Framgaffel Transit 8x2tum stålaxel m hål för skydd hjulaxel. <i>Beställes x 2</i>