

Beställningsstöd

Här presenteras kombinationer av rullstolar i standardutförande och drivaggregat som Hjälpmedelscentralen i VGR rekommenderar gällande funktion och användarvänlighet

- Här presenteras kombinationer av rullstolar i standardutförande och drivaggregat som Hjälpmedelscentralen VGR rekommenderar gällande funktion och användarvänlighet. [Undantag är E-walk och Cross 6 som inte har standardutförande.](#)
- Förskrivare kan enbart beställa drivaggregat i samband med beställning av ny rullstol och endast i nedanstående kombinationer av drivaggregat och rullstolar.
- Vid beställning är det extra viktigt att beställningen görs på samma order, att samleverans bockas i samt att aktivitet/arbetsorder montering registreras och kopplas till drivaggregatet - då följs både rullstol och drivaggregat åt i systemet och inget löper risk att levereras ut var för sig.
- Om utprovningshjälp eller annan kombination/utförande önskas registrera en arbetsorder för konsultation. Önskas beställning av enbart drivaggregat till befintlig rullstol registrera en arbetsorder för konsultation även här

Följande kombinationer av vårdarmanövrerat drivaggregat och manuell rullstol i standardutförande kan beställas

1. E-walk monterad på Transit III
2. E-Walk monterad på Cross 6 med eller utan vårdbroms
3. E-Walk monterad på HD Balance 16" och 24"
4. V25 monterad på Transit III
5. V25 monterad på Cross 6
6. V25 monterad på Azalea, Azalea Assist, Azalea Tal

1. E-walk monterad på Transit III

Beskrivning:

- Drivaggregatet kan monteras av och på från rullstolen
- När drivaggregatet tagits av, kan rullstolen fällas ihop som vanligt
- Rullstolens original tippskydd behöver inte tas bort
- E-walk monteras på Transit III i standardutförande, sittbredd 35- 50 cm
- Höger och vänster sidostycke, sittbredd 40-50 cm följer alltid med beställning om inget annat anges
- Fungerar bäst att köra på hårda underlag, såsom asfalt

Fakta:

- Körsträcka: 22 km
- Brukarvikt: 135 kg för Transit III (150 kg för Ewalk)
- Vikt: 19 kg
- Backtagning: Max 6 grader

Beställningsinstruktion/kundorder :

- Beställ följande artiklar till E-walk samt ny beställning av Transit rullstol med samleverans och registrera en arbetsorder för montering enligt anvisning
- Välj vilket sidostycke efter bredd på rullstol.
- Ange på arbetsordern om manöverpanelen för E-walk skall monteras på höger eller vänster sida.
- Rullstol beställs enligt standardutförande (för standardutförande se www.vgregion.se/hmc)
- Koppla arbetsorder för montering till kundordern.



Sesamnr	Lev.art.nr	Benämning
59332	MCG4750	Drivaggregat E-walk vårdarstyrt inkl Lipo batteri och laddare brukarvikt 150kg.
50774	MCG1105	Monteringsats E-walk till Transit III sittbredd 40-50 cm
Skapas vid behov	MCG1105_SB35	Monteringsssats E-walk till Transit sb35 (Artikelnummer skapas vid behov, kontakta konsulent via kundtjänst)
81243	391165	Sidostycke komplett höger och vänster stolsbredd 35-37,5 cm
Höger och vänster sidostycke, sittbredd 40-50 cm följer alltid med beställning om inget annat anges		

2. E-Walk monterad på Cross 6, med eller utan vårdarbroms (ej std utförande)

Beskrivning:

- Drivaggregatet kan monteras av och på från rullstolen
- När drivaggregatet tagits av, kan rullstolen fällas ihop som vanligt
- Rullstolens original tippskydd behöver inte tas bort
- Val av 8" länkhjul rekommenderas, se beställningsstöd för Cross 6 (för bättre framkomlighet ute)
- Höger och vänster sidostycke sittbredd 40-50 cm följer alltid med beställning om inget annat anges
- Fungerar bäst att köra på hårda underlag, såsom asfalt

Fakta:

- Körsträcka: 22 km
- Brukarvikt: 135 kg för Cross 6 (150 kg för Ewalk)
- Vikt 19 kg
- Backtagning: Max 6 grader

Beställningsinstruktion/Kundorder:

- Beställ följande artiklar till E-walk samt ny beställning av Cross 6 rullstol med samleverans och registrera en arbetsorder för montering enligt anvisning
- Välj vilket sidostycke efter bredd på rullstol
- Ange på arbetsordern om manöverpanelen för E-Walk skall monteras på höger eller vänster körhandtag
- E-walk går endast att montera när rullstolen är inställd i balansläge 6
- Koppla arbetsorder för montering till kundordern



Sesamnr	Lev.art.nr	Benämning
59332	MCG4750	Drivaggregat E-walk vårdarstyrt inkl Lipo batteri och laddare brukarvikt 150kg.
83120	MCG1201_SB35	Monteringssats till E-walk Etac Cross 6 sittbredd 35 och 37,5 cm
81243	391165	Sidostycke komplett höger och vänster stolsbredd 35-37, 5 cm
77472	MCG1201	Monteringssats till E-walk, Etac Cross 6 sittbredd 40-50 cm
Höger och vänster sidostycke, sittbredd 40-50 cm följer alltid med beställning om inget annat anges		
Beställ gärna 8" länkhjul för bättre framkomlighet, se Beställningsstöd Inställning för Cross 6, glöm en att markera samleverans.		

3. E-Walk monterad på HD Balance 16" och 24"

Beskrivning:

- Drivaggregatet kan monteras av och på från rullstolen
- Tiltmöjligheter påverkas inte
- Rullstolens original tippskydd behöver inte tas bort
- E-walk kan monteras på HD Balance i standardutförande, sittbredd 38-50 cm
- Höger och vänster sidostycke sittbredd 38-45 cm följer alltid med beställning om inget annat anges
- Fungerar bäst att köra på hårda underlag, såsom asfalt

Fakta:

- Körsträcka: 22 km
- Brukarvikt: 135 kg för HD Balance (150 kg för Ewalk)
- Vikt 19 kg
- Backtagning: Max 6 grader

Beställningsinstruktion/Kundorder:

- Beställ följande artiklar till E-walk samt ny beställning av HD Balance rullstol med samleverans och registrera en arbetsorder för montering enligt anvisning
- Ange på arbetsordern om manöverpanelen för E-Walk skall monteras på höger eller vänster körhandtag
- Rullstol enligt standardutförande (för standardutförande se www.vgregion.se/hmc)
- Koppla arbetsorder för montering till kundordern.



Sesamnr	Lev.art.nr	Benämning
59332	MCG4750	Drivaggregat E-walk vårdarstyrt inkl Lipo batteri och laddare, totalvikt 180 kg (E-Walk, patient och rullstol)
69585	MCG1190	Monteringssats E-walk till HD Balance 16"/ 24", justerbart stag ingår

4. V25 monterad på Transit III

Beskrivning:

- Drivaggregatet kan monteras av och på från rullstolen
- När drivaggregatet tagits av, kan rullstolen fällas ihop som vanligt
- Rullstolens original tippskydd behöver monteras bort. Särskilda tippskydd skall beställas och sättas på om motorn tas bort
- V25 monteras på Transit III i standardutförande, sittbredd 40-50 cm (för standardutförande se www.vgregion.se/hmc)
- Fungerar bäst att köra på hårda underlag, såsom asfalt.

Fakta:

- Körsträcka: 20 km
- Brukarvikt: 135 kg för Transit III (160 kg för V25)
- Vikt 19 kg
- Backtagning: Max 10 grader upp till 100kg brukarvikt (6,5 grader upp till 160kg brukarvikt)

Beställningsinstruktion/Kundorder

- Beställ följande artiklar till V25 samt ny beställning av Transit rullstol med samleverans och registrera en arbetsorder för montering enligt anvisning.
- Ange på arbetsordern om manöverpanelen för V25 skall monteras på höger eller vänster sida.
- Rullstol enligt standardutförande (för standardutförande se www.vgregion.se/hmc)
- Koppla arbetsorder för montering till kundordern.



Sesamnr	Lev.art.nr	Benämning
78574	1664142	Drivaggregat Viamobil V25 std inkl körhandtag, tippskydd, batteri och laddare samt bulthållare fram och bak (rakt) med nytt fäste för körhandtag o tippskydd 160 kg
59100	1465588	Monteringssats V25 till Transit
36718	1489339	Tippskydd Viamobil V25 rak (höjdstb) par (används då Viamobil är bortkopplad) till Transit III, Cross 6 och XLT OBS: Beställ även 2st 37698
37698	1490322	Tippskyddsinfästning 15 mm Viamobil V25 till Transit (beställes x 2) Beställ även 36718

5. V25 monterad på Cross 6, med eller utan vårdarbroms

Beskrivning:

- Drivaggregatet kan monteras av och på från rullstolen
- När drivaggregatet tagits av, kan rullstolen fällas ihop som vanligt
- Rullstolens original tippskydd behöver monteras bort. Särskilda tippskydd skall beställas och sättas på om motorn tas bort.
- V25 monteras på Cross 6 i standardutförande, sittbredd 40-50 cm
- Utöver rullstolens standardutförande rekommenderas val av 8" länkhjul, se beställningsstöd för Cross 6 (för bättre framkomlighet ute)
- Fungerar bäst att köra på hårda underlag, såsom asfalt

Fakta:

- Körsträcka: 20 km
- Brukarvikt: 135 kg (160 kg för V25)
- Vikt 19 kg
- Backtagning: Max 10 grader upp till 100kg brukarvikt (6,5 grader upp till 160kg brukarvikt)

Beställningsinstruktion/Kundorder:

- Beställ följande artiklar till V25 samt ny beställning av Cross 6 rullstol med samleverans och registrera en arbetsorder för montering enligt anvisning
- Ange på arbetsordern om manöverpanelen för V25 skall monteras på höger eller vänster sida
- Rullstol enligt standardutförande (för standardutförande se www.vgregion.se/hmc)
- Koppla arbetsorder för montering till kundordern.



Sesamnr	Lev.art.nr	Benämning
78574	1664142	Drivaggregat Viamobil V25 std inkl körhandtag, tippskydd, batteri och laddare samt bulthållare fram och bak (rakt) med nytt fäste för körhandtag o tippskydd 160 kg
77774	1594371	Monteringssats V25 till Cross 6
36718	1489339	Tippskydd Viamobil V25 rak (höjdstb) par (används då Viamobil är bortkopplad) till Transit III, Cross 6 och XLT

Beställ gärna 8" länkhjul för bättre framkomlighet, se Beställningsstöd Inställning för Cross 6, glöm en att markera samleverans.

6. V25 monterad på Azalea

Beskrivning:


- Drivaggregatet kan monteras av och på från rullstolen
- Rullstolens original tippskydd behöver inte monteras bort
- Tiltfunktion påverkas inte
- V25 monteras på Azalea i standardutförande, sittbredd 39-49 cm
- Fungerar bäst att köra på hårda underlag, såsom asfalt

Fakta:

- Körsträcka: 20 km
- Brukarvikt: 135 kg (160 kg för V25)
- Vikt 14 kg
- Backtagning: Max 10 grader upp till 100kg brukarvikt (6,5 grader upp till 160kg brukarvikt)

Beställningsinstruktion/Kundorder:

- Beställ följande artiklar till V25 samt ny beställning av Azalea rullstol med samleverans och registrera en arbetsorder för montering enligt anvisning
- Ange på arbetsordern om manöverpanelen för V25 skall monteras på höger eller vänster sida
- Rullstol enligt standardutförande (för standardutförande se www.vgregion.se/hmc)
- Koppla arbetsorder för montering till kundordern.

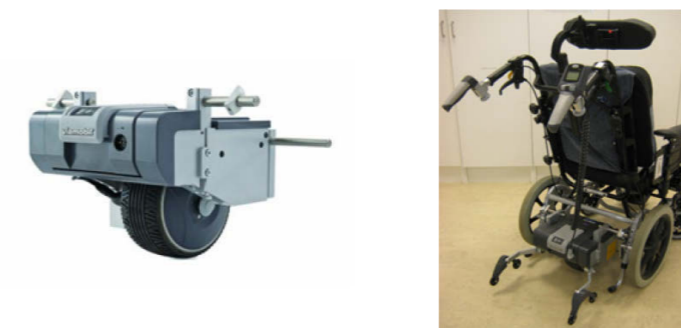

Sesamnr	Lev.art.nr	Benämning
78574	1664142	Drivaggregat Viamobil V25 std inkl körhandtag, tippskydd, batteri och laddare samt bulthållare fram och bak (rakt) med nytt fäste för körhandtag o tippskydd 160 kg
68718	1566408	Monteringssats V25 till Azalea Flex 3, Azalea Assist Flex 3
52602	1457350	Fäste för körhandtag V25 expander S till HD Balance och Azalea. Beställes x 2
36468	SP60128984	Länkhjulsgaffel 110 bred kpl. Beställes x 2
77646	SP1663538	Länkhjul 175x45mm massivt svart u axel. Beställes x 2