

Information

Från hösten 2023 ingår digital blodtrycksmätare i Hjälpmedelscentralens sortiment. Detta innebär att den finns beställningsbar i WebSesam. Digital blodtrycksmätare inkluderar enbart den fysiska produkten, ingen medföljande mjukvara. Blodtrycksmätaren mäter blodtrycket i mm Hg och kan spara upp till 200 mätningar i minnet. När antalet mätningar överskrider 200 raderas de äldsta värdena och nya värden sparas om blodtrycksmätaren inte ansluts med en mottagarenhet.

För dig som arbetar inom regionen:

- Digital blodtrycksmätare kan förskrivas som personligt hjälpmedel inom Västra Götalandsregionen i enlighet med produktanvisningen i handbok för personligt förskrivna hjälpmedel ([Länk](#) till produktanvisning).
- Blodtrycksmätaren används tillsammans med mjukvaran Vård och hälsa för egenmonitorering av patienten.
- Patienten laddar hem appen Vård och hälsa på sin mobiltelefon eller surfplatta (appen har Västra Götalandsregionen som utgivare) och parkopplar mobiltelefonen eller surfplattan till blodtrycksmätaren via bluetooth.
- När patienten mäter sitt blodtryck lagras mätvärdet i Vård och hälsa. Du har ett eget gränssnitt i Vård och hälsa där du kan se mätvärdena.
- För att logga in i mjukvaran krävs att din lokala administratör lägger till dig som användare på din enhet samt ger dig rätt behörigheter. Kontakta din chef för att få kontaktuppgifter till din lokala administratör. Därefter kan du logga in i mjukvaran Vård och hälsa via denna [länk](#).
- Förskrivarens ansvar är samma för digital blodtrycksmätare som för andra hjälpmedel ([Länk](#) till förskrivarens ansvar i handboken för personliga hjälpmedel). När det gäller information om datahantering till patienten kan du hänvisa till appen *Hälsa och vård* eller till *Frågor och svar* om egenmonitorering på Vårdgivarwebben via denna [länk](#). Där finns också ytterligare instruktioner, utbildningsmaterial och länkar för hur du går till väga.

För dig som arbetar inom kommunen:

- Digital blodtrycksmätare kan endast beställas som grundutrustning utan medföljande mjukvara. Möjligheten till förskrivning av digital blodtrycksmätare som personligt hjälpmedel av sjuksköterska inom kommunen utreds.
- För användning som grundutrustning: Blodtrycksmätarens mätvärden kan avläsas manuellt från blodtrycksmätarens display och föras in i ett separat system eller så kan mätvärdena skickas via bluetooth till en enhet som kan ta emot detta, exempelvis en mobiltelefon eller surfplatta. Det sistnämnda kräver att ni i kommunen redan har ett system som kan ta emot data via bluetooth. Det pågår ett arbete inom länet för att hitta andra lösningar för kommunerna att få tillgång till mätvärden från grundutrustning.