

Viktig information efter service av din Astral-ventilator

Kära Astral-användare och vårdgivare,

Din Astral-ventilator har nyligen genomgått service som en del av Resmeds säkerhetsåtgärd.

Under servicen byttes kretskortet inuti din ventilator ut. Detta åtgärdade det problem som beskrivs i brevet om säkerhetsåtgärden.

Efter bytet av kretskortet kan det förekomma skillnader i hur inställningarna för **bakgrundsbelysningens tidsgräns** och **automatisk avstängning** fungerar. Du kanske endast märker dessa skillnader om du vanligtvis använder dessa inställningar. Dessa ändringar påverkar inte din ventilationsbehandling.


Du kan fortsätta att använda din Astral-ventilator enligt de anvisningar du fått av din vårdgivare.

Vi ber om ursäkt för eventuella besvär och tackar för din förståelse. Vi är fortsatt engagerade i att stödja dig och kommer att fortsätta att hålla dig informerad om relevanta uppdateringar så snart de blir tillgängliga.

Vad du kan märka

Om dessa inställningar är aktiverade:

- Tidsgräns för bakgrundsbelysning – Om du har aktiverat denna inställning förblir skärmen påslagen i stället för att stängas av efter att den inte har använts på ett tag.
- Automatisk avstängning – Om du har aktiverat denna inställning och ventilatorn drivs av sitt interna batteri eller ett externt batteri stängs den inte av automatiskt om den lämnas i viloläge.

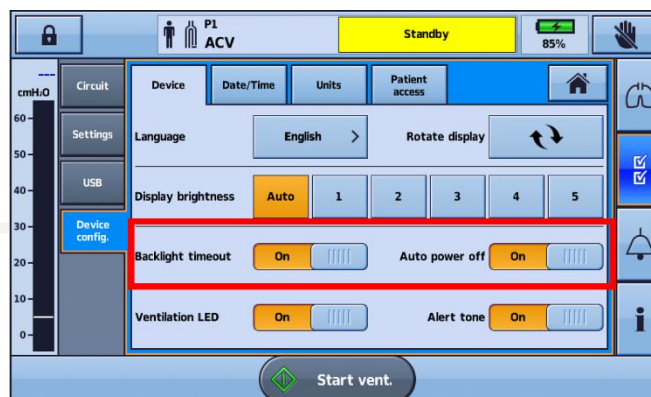

Påverkar detta min behandling?

Detta påverkar inte behandlingen eller larmfunktionerna.

Om du vanligtvis har dessa inställningar aktiverade och använder ventilatorn med det interna batteriet kan du märka en mindre påverkan på batteriets livslängd.

Påminnelse: Det inbyggda batteriet är inte avsett att fungera som primär strömkälla. Det ska endast användas när andra strömkällor inte är tillgängliga eller kortvarigt vid behov, till exempel vid byte av strömkälla.

Vad kan jag göra?


Du behöver inte göra någonting. Du kan fortsätta använda din ventilator som vanligt.

Om du vill att skärmen ska vara mörkare kan du minska skärmens ljusstyrka genom att:


1. Öppna menyn Inställningar.



2. Välja "Enhetskonfiguration".

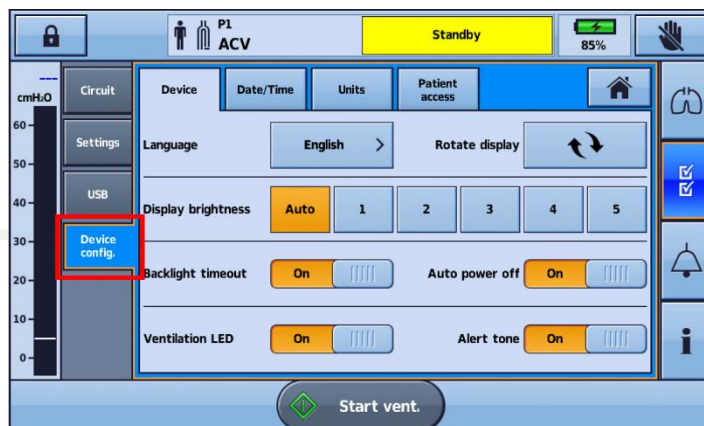

3. Ställa in ljusstyrkan på den lägsta nivån som känns bekväm.

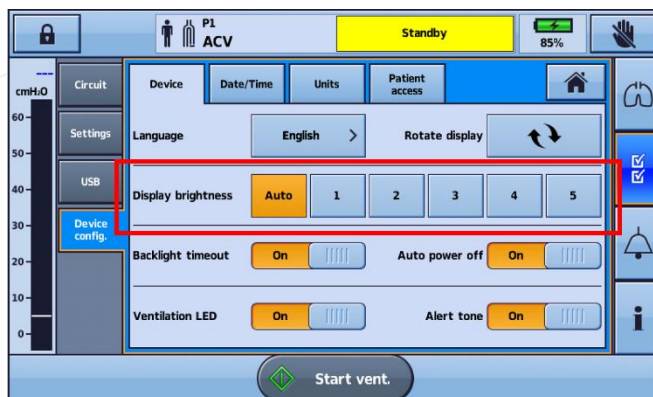

Om du har några frågor, vänligen kontakta din vårdgivare.

Med vänliga hälsningar,

Resmed