



Läkemedelsnära produkter  
2026-04-02

# Checklista för upphandlade sondmatningstillbehör vid enteral nutrition, sond eller gastrostomi

Sortimentskatalog sondmatningstillbehör länk: [Sortimentskatalog Sondmatningstillbehör](#)

**Nutritionspumpar beställs via Hjälpmedelscentralen (HMC) i beställningssystemet webSesam och pumptillbehör beställs via Läkemedelsnära produkter (LMN) i beställningssystemet Sesam LMN.**

## Sondmatningsaggregat

Det finns två sorters sondmatningsaggregat, gravitationsaggregat och pumpaggregat:

- Sondmatningsaggregat är ett sterilt engångsmaterial och byts efter varje matningstillfälle. Vid kontinuerlig näringstillförsel byts sondmatningsaggregat ut minst en gång per dygn.
- Gravitationsaggregat med Sesamnummer: **39594** PVC-innehåll och Sesamnummer: **11118** PVC-fritt, används för matning utan pump som droppar via aggregat. Denna kräver en droppställning eller annan upphängningsanordning.

Pumpaggregat passar endast aktuell leverantörs pump och används när annat inte fungerar:

- Compat Ella nutritionspump kräver Ella pumpaggregat spike ENFit med sesamnummer: **35279**, fungerar med och utan ryggsäck.
- Ella pumpaggregat universal ENFit med sesamnummer: **35280**, är ett likvärdigt aggregat men med bipackad kork. Korken används främst till barn, till exempel Eska nappflaska reko.
- Amica Nutritionspump kräver Amica pumpaggregat mobile ENFit med sesamnummer: **33274**, till ryggsäck.
- Amica pumpaggregat universal ENFit med sesamnummer: **33273**.

## Sondmatningstillbehör vid gastrostomi

Till gastrostomikateter, PEG (percutan endoskopisk gastrostomi) och gastrostomiknapp/port singel eller set:

- Behov av enterala flergångssprutor ENFit främst 60ml med sesamnummer: **33872**, för matning och genomsköljning med vatten före och efter matning. Sprutan används normalt i en till två veckor så länge den ser ren ut efter diskning för hand.

Vid bolusmatning med spruta:

- Behövs bolusadapter Flocare med sesamnummer: **37942**, som skruvas på sondnäringsen och därefter går det att dra ur sondnäringsen för matning med sprutan. Sondnäringsen behöver stå på bordet så näringsen inte hänger och rinner ut via adaptern när sprutan tas bort.

Vid matning med gastrostomiknapp/port:

- Behövs kopplings slangar/matningsslangar för sondmat och vätska. Kopplings slangar finns i olika utformningar och i flera längder. Kopplings slangarna bör bytas varje vecka, diskas för hand, torkas och förvaras i en plastpåse i kylskåp.

Generell information vid gastrostomi:

- En PEG ska inte kuffas då en PEG inte har någon kuffkanal. En PEG brukar dras efter cirka tre månader för byte till gastrostomiknapp eller gastrostomikateter.
- En knapp ska kuffas ofta med kranvatten om patienten inte är på sjukhus. Vid gastrostomiknapp eller gastrostomikateter behövs rätt storlek mätas ut inför förskrivning.

Källa: Information från bland annat sköterska Tuula Hyvärinen, Resursteam Enteralnutrition, SÄS.