

# Simplera Sync™-sensorn & uppdatering av programvara för MiniMed™ 780G

Från och med december 2024 erbjuder Medtronic en kostnadsfri uppdatering av programvaran för MiniMed™ 780G-pumpen. Efter uppdatering kommer pumpen att vara kompatibel med både Guardian™ 4 och Simplera Sync™. Nya användare av MiniMed™ 780G köpta via Skövdedepån f o m december 2024 kommer redan att ha den nya programvaran vid leverans. Befintliga användare av MiniMed™ 780G kommer enkelt och kostnadsfritt att kunna uppdatera sin pump via bluetooth med hjälp av MiniMed™ Mobile-appen. Artikelnummer och pris förblir oförändrade. Det behövs ingen förskrivning av uppdateringen från klinik, dock krävs en förskrivning av nedan dokument (39222), när en befintlig pump ska uppdateras och startas med Simplera Sync™-sensorn. En ny förskrivning krävs också av Simplera Sync™ från klinik.

39222	Uppgradering mjukvara MiniMed 780G	Ska förskrivas i samband med första förskrivningen av sensorer!	0,00
-------	------------------------------------	---	------

Nedan finner ni instruktion om hur ni anmäler en MiniMed™ 780G-pump som ska uppdateras för ny programvara. Efter uppdateringen kan nya sensorn Simplera Sync™ kopplas till pumpen.

## Gör enligt följande steg:

1. I dialog med ansvarig produktspecialist görs en anmälan om uppdatering. Anmälan behöver innehålla: pumpens serienummer, ansvarig diabetessköterskas mailadress samt garantitid på nuvarande sändare.
2. Lägg en förskrivning på Simplera Sync™-sensorer och obligatoriska dokument för MiniMed™ 780G & Simplera Sync™.
3. Meddela pumpanvändaren att anmälan är gjord. Pumpanvändaren uppdaterar programvaran när den finns tillgänglig i MiniMed™ Mobile-appen under menyn "Uppdatera pumpen". Det tar ca **3-7 dagar** efter att anmälan är gjord. **Obs!** Tänk på att patienten aktivt måste gå in i MiniMed™ Mobile-appen och kolla om uppdateringen finns tillgänglig efter anmälan. Inget meddelande skickas till patienten om detta.

**Tips!** Be användaren att avsätta ca 1,5-2 timmar till uppdateringen av pumpen och kom ihåg, läs och **följ stegen i appen/pumpen under uppdateringen.**

Med vänlig hälsning,