

# METOD- KORT

## SERVO-U på MR

Innehållsansvarig: Ulf Alehed MT-samordnare  
Godkänd av: Johan Holmén Sektionschef  
Denna rutin gäller för: Operation 1 barn, DSBS


### Syfte

Ny ventilator som behöver snabbguide. En snabbinstruktion för att komma igång.

### Arbetsförfarande

Vi har 2 Servo-U. En i varje MR-rum.

”On/off” knappen sitter på baksidan. Öppna luckan. **Knappen** dras ut lite och förs åt höger.

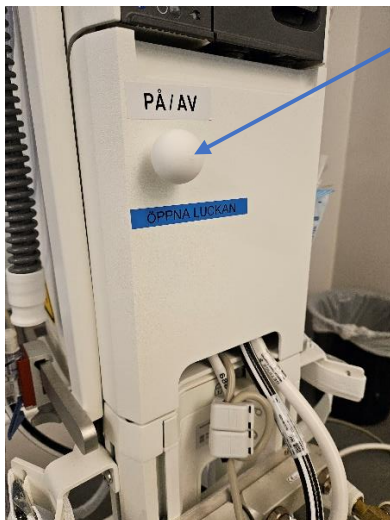

Starta en förkontroll. Följ instruktionen. Först med testslang, byt till andnings slang när det står på skärmen.



# METOD- KORT

## SERVO-MR på MR

Om man vill skriva in vikt, längd och/eller kön. Tryck på **PBW**-knappen uppe till höger. (se bild nedan)



Rekommenderande inställningar:

**Barn 0-15 kg: Smalaste slangar (10mm). Servo-U skall köras i ”pediatrisk” mode**

**Barn >15 kg (ingen övre gräns): Mellanslangar (15mm). Servo-U skall köras i ”vuxen” mode**

**Startinställning** på apparaten är ”vuxen mode”: **VKTS TV 200ml och AF20/minut, PEEP 5.**

**Vid övergång till ”pediatrisk” mode: TK 10 över PEEP, AF 30/minut,**

**Anpassa alltid inställningarna efter den enskilda patienten.**

Starta ventilationen på ”**Starta ventilation**”

**Byt vy till större siffror** för lättare kunna se siffrorna från kontrollrummet. (Se bilder nedan)

På MR 1 ser man genom kontrollrumsfönstret och MR 2 via kameran och dess monitor.

# METOD- KORT

## SERVO-MR på MR



Tryck på vy knappen på sidan.



Tryck på "Distans"

### Stänga av ventilationen



För att avsluta ventilationstillfället tryck på Standby för att sedan hålla inne knappen "Avsluta ventilationen"

Finns ingen "avsluta fall" knapp som på Flow-I som gör att apparaten återgår till defaultinställningar. Det går att rensa persondata (vikt, längd och kön) men inte respiratorinställningarna. Använd rensa dataknappen (via PBW-knappen)



# METOD- KORT

## SERVO-MR på MR



Apné: Gå in på manöver-Statiska mätningar-sedan håll inne förlängd expiration.

Apparaten skall vara avstängd när den inte används. Använd PÅ/AV knappen på baksidan.

### Ansvar

Gäller för operation 1 barn DSBS..

### Uppföljning, utvärdering och revision

Uppföljning och revision ansvaras av medicinsk teknisk samordnare Operaion 1 barn.

Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från lokala rutinen rapporteras i MedControlPRO.”

### Relaterad information

Här noteras redovisande dokument, hänvisningar, checklistor, mallar, arbetsblad, m.m. som utgör arbetsverktyg och hjälpmedel för att följa vårdprogram, rutiner och vårdplaner.

### Dokumentation

Metodkort arkiveras på Sharepoint.

### Kunskapsöversikt

Bruksanvisning Servo-u MR Ventilator System v4.4, Getinge 2022, Solna

### Granskare/arbetsgrupp

Lars-Erik Berg