

-0-=BLODPROV

Screening av bilirubin med JM-105

1 Ta bort instrumentet från dockningsstationen.

2 Rengör mätsonden.

3 Starta instrumentet (om det är avstängt)

4 Tryck på **MENU**-knappen, om så krävs.

5 Välj **MÄTNING**.

Mätning av bilirubin (ej lagring av mätningar i dataloggen). Välj initialt om mätning skall lagras eller ej.

- AV:** Inga mätdata lagras i dataloggen.
- MINNE PÅ:** Mätdata lagras i dataloggen.
- LÄNK PÅ:** Mätdata lagras i dataloggen och skickas till dator.

6 Se till att lampan **READY** (redo) lyser.

7 Placera mätsonden lodrätt mot mätpunkten (på pannan eller bröstbenet) på en yta där tillräckligt med blod cirkulerar.



8 Tryck försiktigt tills lampan lyser.

Om mätning av genomsnitt för mätresultaten från 2 till 5 mätningar har valts, visar displayen det återstående antal mätningar som krävs för genomsnittsresultat.

9 Om genomsnittsresultat har valts: vänta tills lampan **READY** (redo) lyser grönt och upprepa mätningen så många gånger som krävs enligt inställningarna (**2 GÅNGER** eller **5 GÅNGER**). Displayen visar genomsnittet för de sammanlagda mätningarna.



10 Läs av mätningarna.

- Displayen visar upp till 3 mätvärden.
- Om ett mätvärde blinkar ligger det utanför mätningarnas noggrannhetsområde.
- Om **-0-** blinkar i ett mätresultatfält ligger mätvärdet utanför det område som visas (>20,0 mg/dL/>340 mmol/L).
- Tryck på knappen **RENSA** (A) och upprepa steg 2 till 6 för att utföra en ny mätning.

OBS

Om man trycker på **RENSA** en gång raderas det senaste mätvärdet. Om man trycker på **RENSA** och håller inne knappen raderas alla visade mätvärden.

OBS

Om instrumentet inte används under 1 min eller längre blir pekskärmen tom. Rör vid displayen för att aktivera den vid behov.