

Senast reviderat: 2026-04-24

Dokumentet gäller för: Hybrid och intervention Operation 1 och 8

Innehållsansvarig: Monica Thompson, sektionsledare (monak1)

Singelport Inguinal körtelutrymning (Melanom)

Rutinen är ett metodkort med plocklista som syftar till en säker, enhetlig och metodisk planering och framplockning inför ovan nämnda operation

Från sterilcentralen:	Robotgaller Robot set
Op bord:	Standardbord Benplattor special <i>Pinkpad läggs ovanpå den vanliga madrassen. Inget drag mellan madrasserna. Endast pink pads medföljande drag mellan pat och pink pad. Använd tillhörande armvaddering vid inbäddning av vänster arm</i>
Optik:	Robotoptik SP
Extra instrument:	Ev Skopi kärklämmare Glover
Övrigt:	Lamphandtag Instrumentbordslakan x1 Ass bordspåse x1 Slitslakan, stort Fotpåse Monopolär diatermi Ev Bellovac 14 Ev Detachable Endoretrieval pouch 250-300ml/10mm 899102 Suction & Irrigation set- Dual spike 5mm/33cm 899107 Antifog G.O.L.F.F ConMed air Seal gasslang ASM-EVAC1 ConMed AirSeal 8/100 mm port iAS8-100LP Monopolar curved scissors tip SP x1 430035

Postadress:

Hybrid och intervention
Operation 1 och 8
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Telefon:

031-342 81 11

Webbplats:

sahlgrenska.se

	Instrument sheath SP x2 430012 SP Endoscop sheath SP x1 430020 Instrument arm drape SP x1 430013 SP Access port kit, small incision (2,7-4,0cm) 430073 Surgical skin marker <i>med linjal</i> 100L-00-PDG Sandsäck
Robotinstrument:	Arm Fenestrated bipolar forceps da Vinci SP 430011 Arm Monopolar curved scissors da Vinci SP 430004 Arm Cadiere Forceps da Vinci SP 430009 Medium-Large clip applicator 430006 <i>gröna magasin 544230 ligger i robotvagnen</i>
Läkemedel och vätskor:	Sterilt vatten (<i>används till avtorkning/genomspol av instrument/optik</i>) Marcain/Adrenalin 5 mg/ml
Suturer:	PDS 2-0 CT-1 Monocryl 4-0 PS-2
Uppläggning:	Ryggläge Vänster arm inbäddad utefter sidan Höger arm ut på armbord
Op drapering:	Urinkateter sätts enl rutin av pass på sal Tvätta aktuellt ben, ljumske och buk upp till naveln Sätt en ass bordspåse på benplattan Friklä benet med slitslakan
Salsplanering och dockning:	Slida bordet maximalt mot fotändan Sänk bordet i botten Kör in roboten 90gr mot patientens högra sida. OBS! Robot- bommen nedanför lampfästet Robotvagnen vid fotändan <i>Alltid inkopplad i pendel C</i> Kirtorn bredvid robotvagnen SP access port sätts på låret på det aktuella benet Op-ssk sitter på pats vänstra sida Kirurg sitter på samma sida som det ben som ska opereras

	Takhängd skärm mot pats vänstra axel Takhängd skärm mot pats högra axel
Vid konvertering:	Robotens dockas av och kan därefter avlägsnas från patienten Patienten ligger kvar i upplagt läge. Vid timeouten bestäms vem som dockar av samt vem som backar roboten vid en konvertering eller annat akutläge. Lap.tomigaller Kärlgaller Djup Adson Billroth hakar 2 pkt bruna dukar Risslersug Kärlsug
Rengöring:	Robotinstrument: Spolport 1 spoleras igenom med 15ml sterilt vatten, låt instrumentet ligga ner när du spolat genom det. Sätt en fuktad (sterilt vatten) tvätt-tork om skänklarna på robot-instrumentet. Kameraoptik: Spoleras igenom i alla 3 portar, samtidigt som du håller ner knappen i den porten du spolat. Lägg därefter i sin låda.
Startkostnad:	Lägg in startkostnad: Robotkirurgi