

Senast reviderat: 2025-02-13

Dokumentet gäller för: Hybrid och Intervention Operation 1 och 8

Innehållsansvarig: Anna Jarlsnäs Op.ssk (annja28)

## Metodkort Halosträck innan operation

Rutinen är ett metodkort med plocklista som syftar till en säker, enhetlig och metodisk planering och framplockning inför ovan nämnda operation.

### Arbetsbeskrivning

Op kort:	TNA40
Op bord:	Kort kolfibertillsats eller långt bord
Övrigt:	<b>Haloring</b> med positionsskruvar (guldskruvar) Snöre, vikter. På hyllan vid op.borden Haloskruvar 1 fp Skruvmejsel till haloskrub eller engångsskruvmejsel i fp.  Eller: <b>Krona (tång)</b> Snöre, vikter. Flergångsskruvar till kronan 2st. Finns vid op.borden op8
Uppläggnig:	Pat sövs. Halon eller Kronan sätts på innan pat flyttas över till op.bordet.



Denna del är trasig men  
”tången” går att använda  
200617

Krona eller Tång, finns i ortopedsmutten.  
Kronan och skruvarna skall ligga i samma låda.

**När patienten har tången, kan patienten ha ansiktet i Prone view som vanligt.  
När haloringen används kan bara Prone face plus (det mjuka skummet)  
användas men inte det hårda skalet!**



Haloring, finns i tre storlekar, S, M och L

Haloskruvar: Det finns 5 skruvar i fp men det är bara 4 som sätts. Spara plastskyddet som sitter på skruvarna så kan du sätta tillbaka dem på skruvarna sedan.

Gula positionsskruvar 3st används inte alltid. De skall diskas efter användning och åter till apparatförrådet op2.

Haloskruvmejsel flergångs till haloskruvarna.

Fp med engångsskruvmejslar

**OBS Haloskruvar och engångsskruvmejsel skall registreras i Orbit**