

Salivprovtagning med extraktionslösning

Produkter för provtagning

- Extraktionsvätska för salivprovtagning
- Ren engångsmugg och överföringsstrå (valfritt)
- Provuppsamlingsrör utan tillsats, 4 mL med vit kork



VGR-provtagare beställer produkterna från Marknadsplatsen (se nederst på sidan). Externa provtagare: kontakta laboratoriet på tfn 031-3424077 (telefonid kl 14-16) för information om beställning av kit.



Försköljning
med vatten



Skölj 2 min



Personnummer
Analys
Provtagningsdatum
Beställare

Märk röret nogga



Följ instruktionerna – korrekt provtagning är en förutsättning för tillförlitliga analysresultat

1. Kontrollera patientens identitet. Håll patienten under uppsikt under alla provtagningsmoment. Ta provet innan eventuell peroral medicinerings med substans som ingår i analysen (eller i andra hand minst en timme efter peroralt medicinintag).
2. Låt patienten skölja munnen med vatten innan provtagningen (helst 10 min innan, t ex före patientsamtal). Var observant på att patienten därefter inte intar något eller har något i munnen.
3. Öppna röret med extraktionsvätska och låt patienten skölja munnen med den gula vätskan i två minuter.
4. Låt patienten spotta i en ren engångsmugg. Om provet är missfärgat, släng det och upprepa steg 1-3.
5. Håll ner provet i provuppsamlingsröret. Fyll ej ända upp! Minsta provvolym är 1,5 mL.
Vid användning av **överföringsstrå**: Sätt strå i muggen med gula delen uppåt. Se till att stråets ände är täckt av provet (håll gärna burken snett). Tryck ner provuppsamlingsröret på nålen på överföringsstrå.
6. **Viktigt!** Märk röret nogga med personnr, analys, provtagningsdatum och beställare. [Länk med mer info.](#)
7. Skicka provet till Klinisk Kemi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 413 45 Göteborg. Skicka helst provet inom ett dygn, annars förvara kylt. Kyltransport till laboratoriet är inte nödvändigt men transporten bör inte ta mer än ett dygn. Emballaget ska vara markerat med biologiska prover kategori B (UN3373).
 - VGR-provtagare: Prover och ev. remiss skickas med ordinarie provtransport alternativt som internpost. Prover som skickas med internpost ska packas i transporthylsa och transportpåse/transportlåda (se förslag nederst på sidan).
 - Extern provtagare: Skicka prov och remiss med post. Se Folkhälsomyndighetens anvisningar [Packa provet rätt](#) (se folkhalsomyndigheten.se). Exempel på godkänd paketering för leverans med normal postgång är transporthylsa och vadderat kuvert alternativt ytterlåda av kartong med prov i innerpåse med uppsugande material.
8. Överföringsstrået och engångsmuggen sorteras som *Skärande, stickande och smittförande avfall*.

För VGR-provtagare – artikelnummer till Marknadsplatsen

Extraktionsvätska för salivprovtagning	200000971	Avfallskärl (25L)	110193901
Provuppsamlingsrör, vit kork, 4 mL	200015280	Lock till avfallskärl	110193935
Överföringsstrå 8 cm	200000978	Transporthylsa	200000937
Engångsmugg kartong 120 mL	200009814	Transportlåda (kartong)	102796364
		Transportpåse (vadderad)	102764404