

Senast reviderat: 2024-04-04

Dokumentet gäller för: Läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och administrativ personal inom Rehabiliteringsmedicin, verksamhetsområde Neurosjukvård, Område 6

Innehållsansvarig: Ning Zhu, sjuksköterska

Granskare: Carina Meyer, vårdenhetschef, Elisabeth Åkerlund, sektionschef
Rehabiliteringsmedicin

Akutvagn och Hjärtstartare – kontroll för Avd 623

Syfte

Skapa en rutin för kontroll av akutvagnen och hjärtstartaren (defibrillatorn).

Avd 623 ligger på Högsbo sjukhusområde vilket medför att hjärtstoppsteamet inte kan larmas. Vid hjärtstopp eller annan akut situation kontaktas 00-112 för ambulans. Avdelningen är bemannad med läkare endast dagtid måndag till fredag.

Vilka berörs

Sjuksköterskor, läkare och huvudansvariga HLR instruktörer på avdelningen.

Innehåll och metodbeskrivning

Hjärtstartaren (Defibrillatorn)

Det finns en halvautomatisk hjärtstartare på avdelningen. Vid fel kontaktas Medicinsk teknisk avdelning "MTA" på Sahlgrenska tel.: 27100.

Den halvautomatiska hjärtstartaren kontrolleras varje dag. Kontroll görs av ansvarig sjuksköterska. Finns i en röd väska på akutvagnen på röd sjuksköterskeexpedition.

- Kontrollera att väskan är hel att hantera.
- Kontrollera att grön lampa lyser.
- Batteriet kan vara slut i hjärtstartaren- Larmar med ljud larma samt grön lampa blinkar. Finns ett extra batteri att tillgå i hjärtstartarens väska. Vi beställer själva egna batterier till den halvautomatiska hjärtstartaren.
- Om elektrodplattorna torkar, larmar hjärtstartaren med ljudlarm. Byt plattan.
- Om ljudlarm som inte gäller batteri el. elektrodplatta står meddelande på skärmen.
- Det skall alltid finnas två par elektroder i hjärtstartarens väska och två par i akutvagnen.

- Det skall alltid finnas ett extra batteri samt en rakhyvel i hjärtstartarens väska.
- Hjärtstartaren skall till MTA med jämna mellanrum. När, står på hjärtstartaren. Medicinsk teknisk ansvarig på avdelningen ser till detta åtgärdas. En lånehjärtstartare skall vara på plats innan vår lämnas till MTA. Kontakt tas med MTA innan servicen ska ske för att stämna av att lånehjärtstartare finns att tillgå.

Kontroll av 2 Syrgastuber på akutvagn

Kontroll en gång i veckan (måndagar) av den påkopplade syrgas tuben görs av ansvarig sjuksköterska.

- Öppna den stora kranen.
- Kontrollera på mätaren hur mycket syrgas det finns i tuben.
- Stäng kranen.
- Vid mindre än 70 bar, skall man kontakta vaktmästaren för byte av tub mobil 0736 – 254416, vardagar mellan 7-16.00 samt helger 9-16.00. Övrig tid västfastigheter tel. 010 - 44 13 500.
- Pys ut syrgasen genom att öppna ventilen för antal liter.

Kontrollera Sug på akutvagn

- Öppna syrgas kranen.
- Dra ut blå knapp på sidan av sugen.
- Reglera sugtrycket med den silvriga knapp som sitter uppe på samt titta på sugtrycket.

Kontroll av akutvagn sker efter rutin.

Ansvar

Kontroll av akutvagnen görs måndagar av ansvariga. Efter hjärtstopp eller brytning av akutvagnen. Är det den ansvariga sjuksköterskan som ansvarar för att denna återställs i sitt ursprungliga skick. Signering görs i röd akut pärm som finns på röd sjuksköterske expedition.