

Senast reviderat: 2024-02-15

Dokumentet gäller för: Avd 134

Innehållsansvarig: Magdalena Nyberg Ridell, fysioterapeut SU, Sahlgreńska

Granskare:

PEP mask-munstycke-ventil

Syfte

Att säkerställa att patienten får rätt andningshjälpmedel och att det hanteras enligt gällande hygienrutiner.

Ansvar

Ansvarig fysioterapeut bedömer i samråd med personal om patienten är i behov av andningshjälpmedel, ansvarar för utprovning och information till patient/personal. Fysioterapeuten ansvarar för att hjälpmedlet märks upp med det datum det tas i bruk.

Personal ansvarar för att hygienföreskrifter gällande för det utprovade andningshjälpmedlet följs. Vårdenhetschef är ansvarig för att rutinen är känd och följs.

Arbetsbeskrivning

- Personal informerar fysioterapeut som i samråd med ansvarig personal avgör om patienten är i behov av andningshjälpmedel eller inte.
- Ansvarig fysioterapeut provar ut lämpligt andningshjälpmedel
- Personal genomför andningsträning enligt fysioterapeutens ordination
- Personal ansvarar för rengöring av andningshjälpmedel
- Blå PEP-mask, PEP-ventil, kopplingsmunstycke, mellankoppling till tracheostomi och motstånd är flergångs och kan köras i dekonter. Ska rengöras mellan varje patient eller oftare vid behov.
- PEP ventil samt mellankoppling som används på tracheostomi rengörs minst 1 gång/dygn.
- Grön PEP-mask och mini-PEP är enpatients och ska slängas efter 7 vård dygn.

Postadress:

Ange verksamhet
Ange avdelning/enhet
Sahlgreńska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Telefon:

031-342 10 00

Webbplats:

sahlgreńska.se

Uppföljning och utvärdering

Vårdenhetschef ansvarar för uppföljning av rutinen samt hur avvikelser för rutin hanteras t.ex. i MedControl Pro

Dokumentation

Ansvarig fysioterapeut dokumenterar utprovat hjälpmedel och träningsrekommendationer under "Rehabiliteringsplan".

Postadress:

Ange verksamhet
Ange avdelning/enhet
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Telefon:

031-342 10 00

Webbplats:

sahlgrenska.se