

Senast reviderat: 2024-02-15
Dokumentet gäller för: Avdelning 623
Innehållsansvarig: Carina Meyer, vårdenhetschef avd 623
Granskare: Elisabeth Åkerlund, sektionschef Rehabiliteringsmedicin

Syrgas och sug kontroll för Avdelning 623

Syfte

Skapa en rutin för kontroll av transportabel syrgas, sug och pocketmasker.

Ansvar

Kontroll en gång på onsdagar varje vecka av en sjuksköterska.
Signering görs i röd akut pärm som finns på röd sjuksköterskeexpedition på avd. 623.

Bakgrund

För att säkerställa kontrollen av transportabel sug/syrgas och pocketmasker. Viktigt att detta fungera då vi inte har tillgång till syrgas och sug på rummen.

Innehåll och metodbeskrivning

Kontroll av stor Syrgastub (20L) som finns lilla förrådet inne på röd expedition.

- Öppna den stora kranen.
- Kontrollera på mätaren hur mycket syrgas det finns i tuben.
- Stäng kranen
- Vid mindre än 70 bar, skall man kontakta vaktmästaren för byte av tub mobil 0736 – 254416, vardagar mellan 7- 16.00 samt helger 9- 16.00. Övrig tid västfastigheter tel. 010 - 44 13 500
- Pys ut syrgasen genom att öppna ventilen för antal liter.
- Om den transportabla syrgastuben används på annan plats, exempelvis på ett patient rum, skall gul varningsskylt märkas utanför rummet. Detta är av stor vikt att veta vid exempelvis brand. Varningsskylt hänger på syrgastuben.
- Skiftnyckel hänger på syrgastuben.

Kontrollera transportabel sug som finns kopplad till stora syrgastuben i lilla förrådet inne på röd expedition.

- Öppna syrgas kranen
- Dra ut blå knapp på sidan av sugen.
- Reglera sugtrycket med den silvriga knapp som sitter uppe på samt titta på sug trycket.
- Ej fukta, ej vatten i vattenflaskan vid användning av sug och/eller syrgas. (Skall aldrig vara extern fukt utan i mycket speciella situationer).

Kontroll av elektrisk transportabel sug.

- Sätt i kontakten i väggen.
- Starta med på och av knappen
- Kontrollera att sugen fungerar
- Bruksanvisning hänger till höger på maskinen.

Kontrollera datum av underhåll/service/besiktning av medicinsk apparatur. Börjar detta datum närma sig underrätta ansvarig på avdelningen. Ansvarig på avdelningen för att medicinsk apparatur är undersköterska Susanne Björk. Finns även en pärm på avdelningen där detta registreras av ansvarig.

Kontroller av pocketmasker

- Kontrollera att det finns en pocketmask på varje patient rum.