

Senast reviderat: 2020-10-23

Dokumentet gäller för: Verksamhet Transplantationscentrum

Innehållsansvarig: Kristjan Karason, Universitetssjukhusöverläkare, Läkare Transplantation (krika23)

Granskare/arbetsgrupp

Anna Carlander, sjuksköterska och Caroline Ingemarsson, sjuksköterska, Transplantationscentrum, SU/S

Defibrillator halvautomatisk - Heart Start FR3

INNEHÅLL VÄSKA	ANTAL
Extra batteri	1 st
Engång defipads	2 st
Rakhyvel	1 st

UTANFÖR VÄSKA	ANTAL
Bruksanvisning	2 st

Efter defibrillering:

När defibrillering skett ska "SIM-kortet" lämnas för analys till HLR-expeditionen. Om hjärtstopp sker en helg eller natt låter man SIM-kortet sitta kvar och lämnar det nästkommande vardag.

Vid akuta lägen finns elektroder att hämta på HLR-centrum i utlåningsrummet i foajén. Notera datum, avdelning, kostnadsställe och antal i pärmen som står i rummet

Att kontrollera:

- Kontrollera utgångsdatum på Defipads.

Skötsel:

Rengöring görs i samband med genomgång av akutvagn:

- sista helgen varje månad samt vid behov
- utvändigt med mild tvättmedel (ytdeinfektion eller liknande får inte användas).

Vid fel kontakta Maskinteknisk avdelning, tel. 27100

Källa: HLR-centrum

Manual FR3-defibrillator

Postadress:

VO Transplantationscentrum
Avdelning/enhet 139
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Telefon:

031-342 10 00

Webbplats:

sahlgrenska.se