



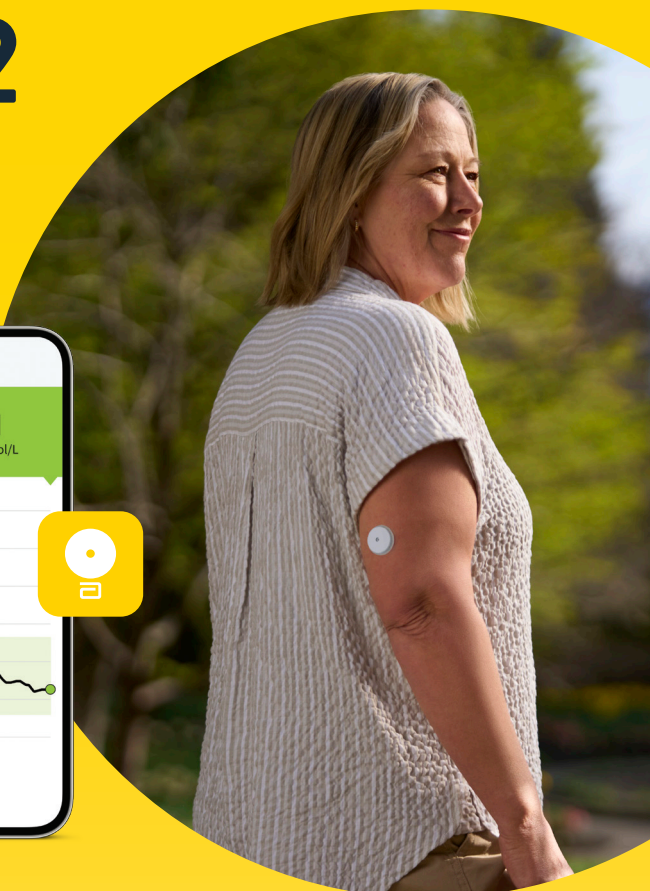


FreeStyle

Libre 2

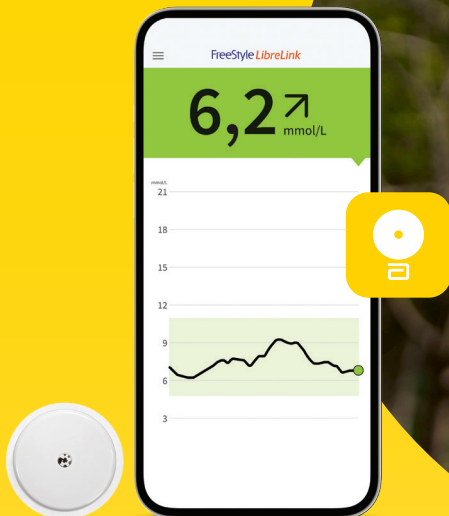

Förbered dig inför din FreeStyle Libre 2-start

En guide till hur du laddar ner och skapar konto i FreeStyle LibreLink-appen¹.

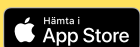



Bilder och simulerade data är endast i illustrativt syfte, det är inte från någon verklig patient.
1. FreeStyle Libre-systemens appar är endast kompatibla med vissa mobila enheter och operativsystem. Vänligen kontrollera vår webbplats för mer information om kompatibiliteten för din mobila enhet innan du använder apparna. Användning av FreeStyle Libre-systemens appar kan kräva registrering i LibreView.



Ladda ner FreeStyle LibreLink-appen¹



1 Tryck på **Play Butik** eller **App Store**-ikonen på din hemskärm

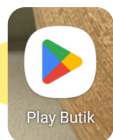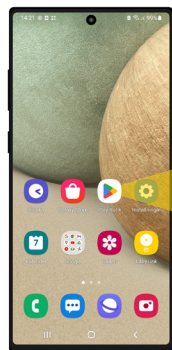

Android:

Om du inte är inloggad på ditt Googlekonto så kommer du att bli ombedd att:


- Skriv in din Google e-mail eller telefonnummer och tryck på **Nästa**
- Skriv in ditt lösenord och tryck på **Nästa**



iOS:

Om du inte är inloggad med ditt Apple-ID så kommer du att bli ombedd att:



- Skriv in ditt Apple-ID
- Skriv in ditt lösenord och tryck på **Logga in**

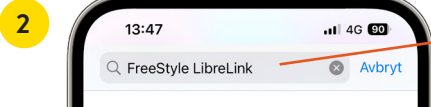



I sökfältet så skriver du **FreeStyle LibreLink**

3 Lokalisera **FreeStyle LibreLink**-ikonen, ladda ner och tryck sedan på **Öppna**

Android

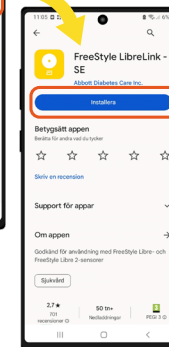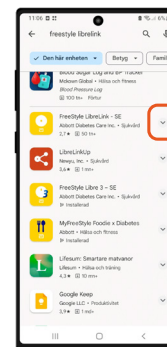

iOS

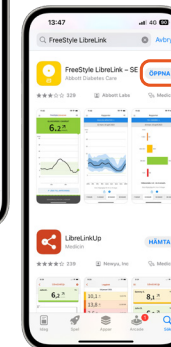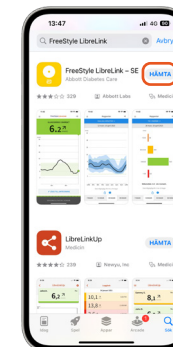


4 **FreeStyle LibreLink**-ikonen kommer att hamna på din hemskärm

Android



iOS

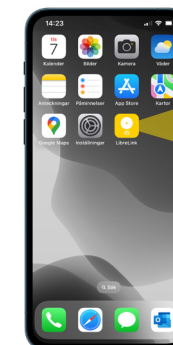

1. FreeStyle Libre-systemens appar är endast kompatibla med vissa mobila enheter och operativsystem. Vänligen kontrollera vår webbplats för mer information om kompatibiliteten för din mobila enhet innan du använder apparna. Användning av FreeStyle Libre-systemens appar kan kräva registrering i LibreView.

Skapa konto i FreeStyle LibreLink-appen

Följ dessa steg för att skapa ditt konto i FreeStyle LibreLink-appen och få en genomgång av hur appen fungerar. Om du redan har ett konto väljer du Logga in istället för Börja nu vid steg 1.

Appen kommer att begära olika behörigheter som behövs för att den ska fungera. Bevilja dessa när de begärs.




Tips! Här kan du skriva upp din e-postadress och lösenord.

E-post:


Lösenord:




Tryck på **Börja nu** för att starta ett nytt konto

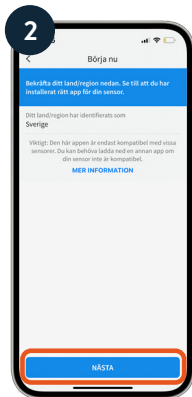


Bekräfta land och tryck på **Nästa**

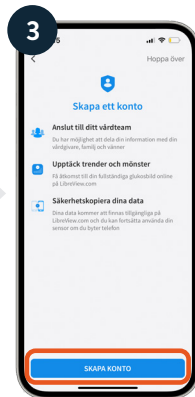

Läs igenom och tryck på **Skapa Konto**

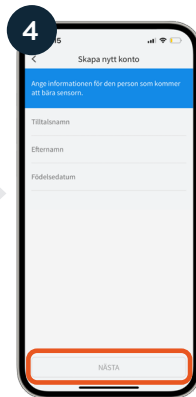


Fyll i din information och tryck på **Nästa**

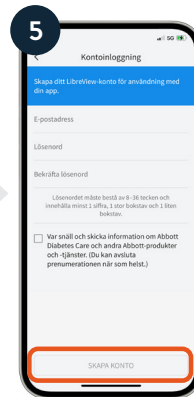


Fyll i din information och tryck på **Skapa konto**




Välj genom att trycka på **Godkänn** eller **Avbörj**

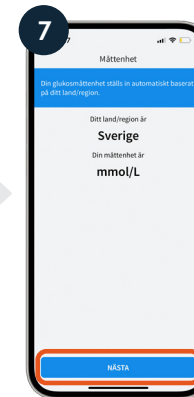


Välj Sverige och mmol/L och tryck på **Nästa**

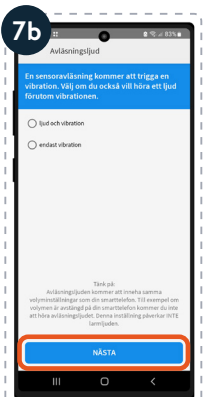

För **Android-användare**: välj ljud och/eller vibration

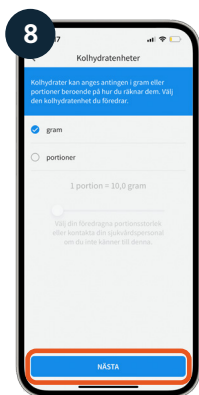

Välj det mått som du önskar och tryck på **Nästa**

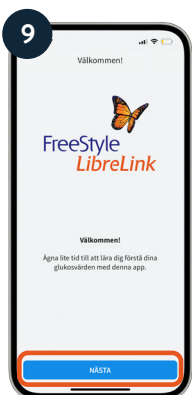


Tryck på **Nästa** för att få en genomgång av appen



Tryck på **Nästa** för att komma vidare




Tryck på **Nästa** för att komma vidare

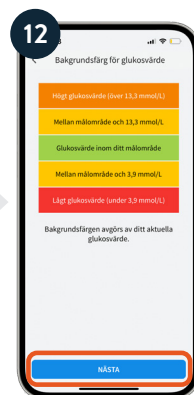


Tryck på **Nästa** för att komma vidare



Tryck på **Nästa** för att komma vidare

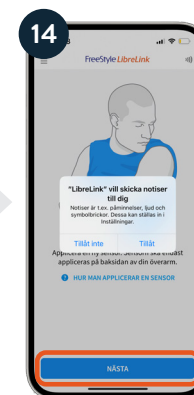

För att ta emot glukoslarm och varningar behöver du trycka på **Tillåt**

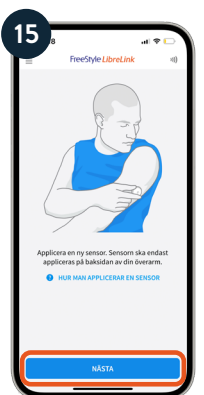

Nu är du redo att starta din sensor



Grattis!
Nu har du gått igenom alla stegen i FreeStyle LibreLink-appen och är redo att starta igång din FreeStyle Libre 2 Plus-sensor.




Anmäl dig till ett av våra FreeStyle Libre 2-webbinarier där du får information om hur systemet fungerar.


<https://www.freestyle.abbott/se-sv/upptack/webbinarier.html>

Så här delar du din glukosdata ifrån FreeStyle LibreLink-appen med din klinik. Klinikens ID får du genom din sjukvårdskontakt.


Klinikens ID:

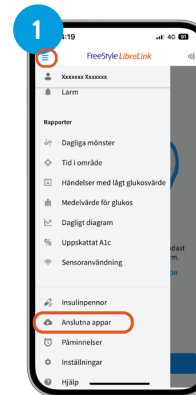


Tryck på **Meny** och sedan på **Anslutna appar**

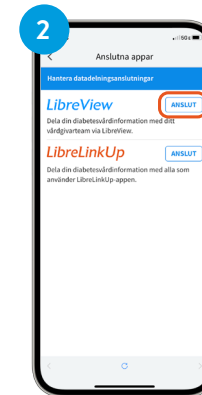


Välj **Anslut** på LibreView

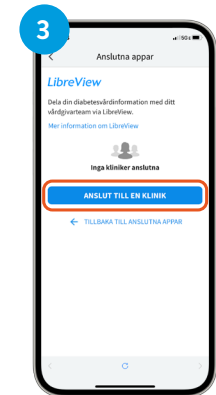


Tryck **Anslut till en klinik**

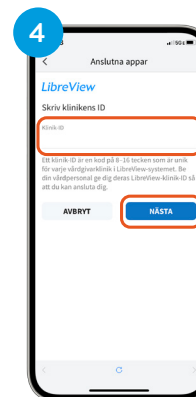

Skriv in klinikens id och tryck på **Nästa**

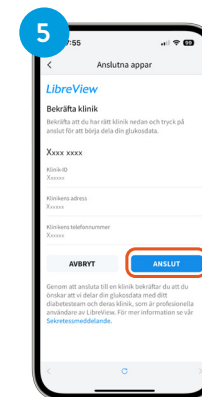

Tryck **Anslut** för att bekräfta

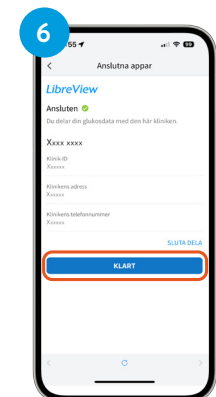

Tryck **Klar**

Datahanteringsprogrammet LibreView är avsett att användas av både personer med diabetes och vårdpersonal, för att hjälpa personer med diabetes och deras vårdpersonal vid granskning, analys och utvärdering av datahistorik i glukosmätare som stöd för effektiv diabeteshantering. Programvaran LibreView är inte avsedd för behandlingsbeslut och ska inte användas som ersättning för professionell vårdrådgivning.



FreeStyle

Libre 2

Vi finns här för dig

Ring oss om du behöver råd och vägledning om FreeStyle Libre 2-systemet.

E-post: diabetes.sverige@abbott.se

Telefon: 020-190 11 11

Öppet helgfria vardagar kl. 8:00–18:00

Följ oss i sociala medier



För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa möjliga sätt önskar vi att du förbereder följande innan du ringer oss:

1. Serienummer

(hittas på sensorn eller i FreeStyle LibreLink-appen under menyn ”om”)

2. Den använda sensorn

(endast vid reklamation)



Läs mer på

www.FreeStyle.Abbott



Bilder och simulerade data är endast i illustrativt syfte, det är inte från någon verklig patient. Libre-systemen är avsedda för att övervaka glukosnivåer i vävnadsvätska hos personer med diabetes. Läs bruksanvisningen före användning. ©2025 Abbott. Alla rättigheter förbehållna. Libre, fjärrislogotypen, sensorns form och utseende, den gula färgen samt relaterade varumärken och/eller design är immateriell egendom tillhörande Abbott-koncernen i olika regioner. Andra varumärken tillhör respektive ägare ADC-125242 v1.0 12/25

Abbott