



Dexcom G7 CGM

Det andra sättet att kontrollera sockret är via sensorn på barnets arm. Sensorn består av en tråd som sitter i underhudfettet som skickar värdena till hans mobiltelefon via bluetooth. Sensorn byter familjen efter 10 dagar.

- Telefonen måste befinna sig inom bluetooth-avstånd dvs ca **6 meter** från barnet för att kunna visa siffror. Från barnets telefon sänder den sedan vidare till föräldrarnas följartelefoner.
- Dexcomappen måste **alltid** vara öppen på barnets telefon.
- Dexcomappen larmar om barnet går över eller under de förinställda larmgränserna för sensorsocker.
- Dexcomappen visar en siffra, vilket motsvarar sensorsocker mätt i mmol/l. Appen visar också trender i form av pilar.

Om Dexcomappen slutar funka så testa att:

- Stänga av bluetooth i 10 sek och sen sätta på det igen.
- Lägga telefonen närmare barnet

Om sensorn har lossnat från armen: Kontakta föräldrarna och ta sedan blodsocker via blodsockermätaren inför måltid, två timmar efter måltid samt vid misstanke om låga nivåer.