

Senast reviderat: 2025-12-01 rev 7

Dokumentet gäller för: Sektionen för Hematologi och Koagulation

Innehållsansvarig: Katarina Olsson Lundberg, Leg. Sjuksköterska/Aferessjuksköterska/ACFD

Godkänd av: Martin Stenson, Sektionschef. Jan-Erik Johansson, BMT-överläkare/CPD/ACFMD

## B11 Säkerhetskontroller före aferesstart

### Revideringar i denna version

- Tillägg rutin B28 för dokumentation på Aferesprotokoll
- Tillägg kontroll att aferesmaskin kopplas upp till uttag med reservkraft

### Revisionshistoria

Rev	Giltig från	Förändring	Författare
6	2021-08	<ul style="list-style-type: none"><li>• Inga förändringar gjorda</li></ul>	Katarina Olsson Lundberg Jan-Erik Johansson
5	2018-11	<ul style="list-style-type: none"><li>• Förtydligande av rutin samt vissa mindre språkliga ändringar.</li></ul>	Katarina Olsson Lundberg
4	2015-11	<ul style="list-style-type: none"><li>• Inga ändringar har gjorts jämfört med föregående version</li></ul>	Katarina Olsson Lundberg
3.1	2013-04	-	Anna Söderstrand
2	-	-	-
1	-	-	-

### Dokumentation

Dokumentation görs på aferesprotokollet som skannas i patientjournalens e-arkiv.

### Granskare

Inger Andersson, Leg. Sjuksköterska/JACIE-koordinatör

Jan-Erik Johansson, Överläkare/CPD

## 1. Kontrollåtgärder före aferesstart

Före aferes genomförs följande kontroller för att därefter signeras på aferesprotokollet:

**Bilaga B1, B5, B6, B9, B10, B28:** [AFERESPROTOKOLL](#)

- Visuell inspektion av aferes-set med uteslutande av knickade slangar, ocklusion, kontamineringsrisk, systembrott, skador på uppsamlingspåsarna, samt kontroll att hållbarhetsdatum inte överskridits.
- Visuell inspektion av primevätskor för uteslutande av kontamineringsrisk, missfärgning, läckage, skador på förpackningarna, samt kontroll att hållbarhetsdatum inte överskridits.
- Bekräftande av patient eller donatoridentitet med namn, personnummer och eventuell donatorskod.
- Kontroll att aferesmaskin får ström från uttag med reservkraft för att undvika avbrott vid strömavbrott.
- Säkerhetstest av aferesmaskin inför varje aferes enligt angiven rutin från tillverkaren.
- Kontroll av maskinamn samt LOT/BATCH-nummer på aferes-set och använda vätskor.